


Akıllı Asistan

Akıllı Asistan, ihtiyaç duyulan her an ve her yerde eller serbest yardım sağlayan uygulama tabanlı bir asistandır. Kullanıcılar rahatça soru sorabilir, işitme cihazı ve aksesuar sorunlarını giderebilir veya sadece işitme cihazı sesini değiştirmek, işitme cihazlarını sessize almak, programları değiştirmek veya hatırlatıcı ayarlamak için bir komut söyleyebilir. Kullanıcılar “telefonumu bul” veya “telefonumu kaybettim” gibi şeyler bile söyleyebilir ve Akıllı Asistan, kilitli veya sessiz modda olsa bile telefonda bir zil sesi çalarak kullanıcının kaybolan akıllı telefonunu bulmasına yardımcı olur. Akıllı Asistan belirli 2,4 GHz işitme cihazlarında mevcuttur.

Nasıl Çalışır?


- 1 Erişmek için, My Audibel ana ekranının sağ üst köşesindeki Akıllı Asistan  simgesine dokununuz. Kullanıcılar, kullanıcı kontrolü olarak ayarlanmışsa Akıllı Asistan'a erişmek için işitme cihazlarına iki kez dokunabilirler.
- 2 Akıllı Asistan “Dinleniyor...” ifadesini gösterecektir.
- 3 Bir soru sorun veya bir komut belirtin. Akıllı Asistan sesli komutlara yanıt verir. Komutu belirtirken belirli bir dil gerekmez. Örneğin, kullanıcılar “İşitme cihazlarımı aç” veya “İşitme cihazlarımın sesini artır” diyebilir.
- 4 Akıllı Asistan komutu yürütür veya soruya uygun bir yanıt arar ve yanıt verir. Kullanıcılar, varsa yanıtları 2,4 GHz işitme cihazları aracılığıyla duyar.

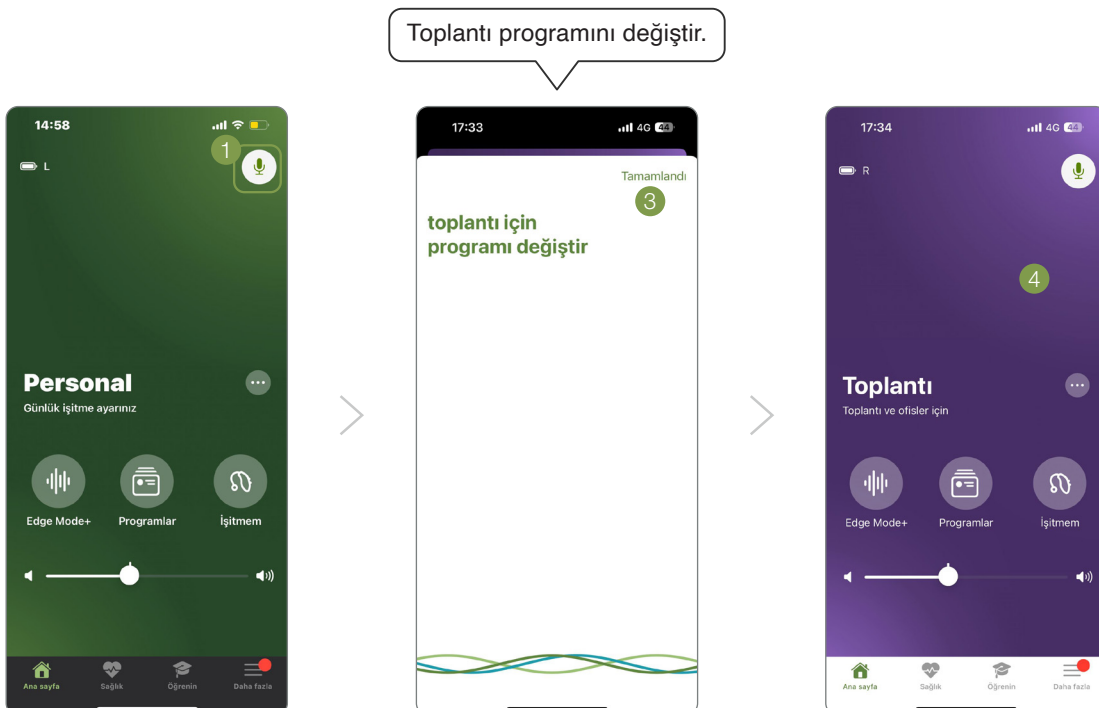

Kullanıcı Kontrolleri

Kullanıcı kontrolleri pro fit yazılımından aktifleştirilip ayarlanabilir. Kullanıcılar uygulamada Akıllı Asistan'a erişmek için çift dokunabilirler.

Kullanıcı Kontrolleri ekranında Akıllı Asistan'ı etkinleştirin "Akıllı Asistan"ı Çift Dokunma konumuna sürükleyerek. "Akıllı Asistan" yalnızca Çift Dokunma konumuna yerleştirilebilir. İşitme cihazı kullanıcıları ayrıca My Audibel'de **İşitmem** > **Ayarlarım** > **Dokunma Kontrolü** altında dokunma hareketinin işlevselliğini seçebilirler.

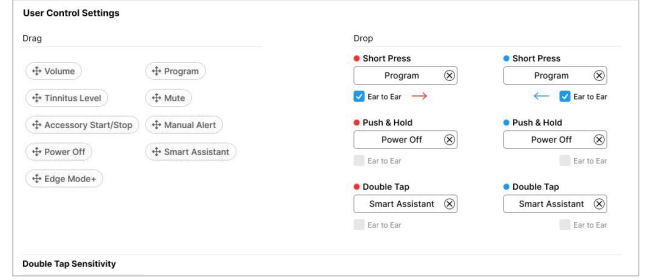

Göstergeler

- Yardıma Hazır: Kullanıcılar, Akıllı Asistan dinlerken tonlu bir gösterge duyacaktır.
- İletişim Arızası: Akıllı Asistan kullanılırken bir iletişim arızası olursa, işitme cihazlarında tonlu bir gösterge çalacaktır.
 - İletişim arızalarını azaltmak için şunlardan emin olun:
 - a. Akıllı telefon açık ve internete bağlı (hücresel ağ veya WiFi üzerinden)
 - b. İşitme cihazları açık, Bluetooth® ile eşleştirilmiş ve akıllı telefona bağlı
 - c. Audibel'im ön planda veya arka planda çalışıyor

