

Audibel Intrigue AI
Yapay Zeka

Kablosuz Kişiyeye Özel Şarj Edilebilir İşitme Cihazı Kullanım Kılavuzu



Şarj Edilebilir Ürünler

ITC R (Kanal İçi) Şarj Edilebilir

HS R (Yarım Kabuk) Şarj Edilebilir

ITE R (Kulak İçi) Şarj Edilebilir

Uyarılar, Dikkat Edilecek Unsurlar ve Duyurular

GEREKLİ İŞİTME CİHAZI BİLGİLERİ

Aşağıdaki ek bilgiler ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) düzenlemelerine uygun olarak sağlanmıştır:

**UYARI: 18 yaşından küçükler işitme cihazı kullanmadan önce doktora gitmelidir.**

18 Yaşından küçüklerin özel bakıma ihtiyacı vardır ve işitme cihazını tıbbi değerlendirmesini yaptırmadan kullanmak işitme kaybını kötüleştirebilir. 18 yaşından küçük bir işitme cihazı kullanıcısı, yakın zamanda bir doktordan, tercihen bir kulak burun boğaz doktorundan (KBB) tıbbi bir değerlendirme yaptırmalıdır. İşitme cihazı kullanmadan önce bir doktor, cihazın kullanıcının uygun olduğunu belirlemelidir.

İşitme cihazı uygulayıcılarına **UYARI:**

Potansiyel bir işitme cihazı kullanıcısına, kullanıcıyla ilgili mevcut diğer bilgileri sorgulayarak, durumunu gözlemleyerek veya gözden geçirek belirlerseniz, işitme cihazını uygulamadan önce derhal bir doktora, tercihen KBB gibi bir işitme uzmanına danışmasını tavsiye etmelisiniz, potansiyel işitme cihazı kullanıcısı için koşullar aşağıda belirtilmiştir:

- Doğuştan veya travmatik olarak deformite,
- Son 6 ay içinde kulaktan sıvı, irin veya kan gelmesi
- Kulakta ağrı veya rahatsızlık,
- Aşırı kulak kiri öyküsü veya kulak kanalında bir şey olduğuna dair şüphe
- Yakın zamanda veya uzun süredir devam eden baş dönmesi
- Son 6 ay içinde aniden hızla kötüleşen veya dalgalanan işitme kaybı
- Yalnızca tek kulakta işitme kaybı veya çınlama (tinnitus) veya kulaklar arasında göze görülür işitme farklığı
- Odyometrik hava-kemik aralığı 500 Hz, 1000 Hz ve 2000 Hz'de 15 dB'ye eşit veya daha büyük olması

UYARI İşitme Cihazı uygulayıcısına, maksimum ses basıncı seviyesi 132 dB SPL'in üzerinde ise;

İşitme cihazı kullanıcısının kalan işitmesini etkileyebileceğinden, maksimum ses basıncı seviyesi 132 dB SPL'yi aşan bir işitme cihazı seçerken ve takarken dikkat etmelisiniz.

Uluslararası kullanım

İşitme cihazlarınız ülkenize veya bölgenize özel radyo frekansında çalışmak üzere onaylanmıştır. Ayrıca ülkeniz veya bölgeniz dışında kullanılması onaylanmayabilmektedir. Uluslararası seyahat sırasında çalıştırmanın diğer elektronik cihazlarda parazit neden olabileceğini veya diğer elektronik cihazların işitme cihazlarınızda parazit neden olabileceğini unutmayınız.

Uyarılar, Dikkat Edilecek Unsurlar ve Duyurular

Mevzuat gereği aşağıdaki uyarıları yapmanız gerekmektedir.

 **UYARI:** Kabloşuz işitme cihazlarının doğrudan diğer elektronik ekipmanların yanında kullanımasında kaçınılmazdır çünkü bu durum uygunsuz performansa neden olabilir. Böyle bir kullanım gerekiyorsa; işitme cihazlarınızın ve diğer ekipmanlarınızın normal şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol edin.

 **UYARI:** İşitme cihazlarının üreticisi tarafından sağlananlar dışındaki aksesuarların, bileşenlerin veya yedek parçaların kullanılması, elektromanyetik emisyonların artmasına, elektromanyetik bağışıklığın azalmasına neden olabilir ve performansın düşmesine neden olabilir.

 **UYARI:** Taşınabilir Radyo Frekansı İletişim ekipmanı işitme cihazınıza 30 cm'den (12 inç) daha yakın kullanılırsa işitme cihazınızın performansında düşüş meydana gelebilir.

Böyle bir durumda iletişim ekipmanından uzaklaşın.

 **UYARI:** İşitme cihazının stabilitesi normal kullanım için tasarlanmıştır. Cihazın kırılmasına veya cihazın bileşeninin kopmasına neden olabilecek bir işitme cihazı takarken kulağa fiziksel etkilere kaçınınız. Bu, kulak kanalının yırtılmasına veya kulak zarının delinmesine neden olabilir. Bu meydana gelirse, değerlendirme ve güvenli bir şekilde çıkarılması için bir doktora görünmeniz şiddetle tavsiye edilir.

 **UYARI:** İşitme cihazı sert bir yüzeye düşerse, işitme cihazının kırılmasına veya hasar görmesine neden olabilir. Buna, cihazın aksarı da dahildir. Kulunuza yerleştirmeden önce işitme cihazının sağlam olduğundan emin olun. Cihazın hasarı olduğunun tespit ederseniz, kullanmayı bırakın ve işitme uzmanınıza görün.

 **UYARI:** Çıkarma yardımcısına baskı uygulanması, cihazın kırılmasına neden olabilir. Çıkarma yardımcısı kırılırsa ve cihazı dikkatlice çıkaramazsanız, güvenli bir şekilde çıkarılması için bir hekime görünmeniz önerilir.

İŞİTME UZMANINA UYARI

Bir işitme uzmanı, olası bir cihaz kullanıcısına, cihaz kullanmadan önce derhal lisanslı bir hekime (tercihen bir KBB uzmanına) danışmasını tavsiye etmelidir; eğer işitme uzmanı, potansiyel kullanıcının durumunu gözlemleyerek uygulama yapmalıdır. Potansiyel kullanıcı için koşullar aşağıda belirtilmiştir:

- Kulağın göze görülür konjenital veya travmatik deformitesi
- Son 90 gün içinde kulaktan aktif drenaj öyküsü
- Son 90 gün içinde ani veya hızla ilerleyen işitme kaybı öyküsü
- Akut veya kronik baş dönmesi
- Son 90 gün içinde ani veya yeni başlayan tek taraflı işitme kaybı

Uyarılar, Dikkat Edilecek Unsurlar ve Duyurular

UYARI: Tinnitus terapi sesi üreten cihazların kullanımıyla ilişkili bazı endişeler var. Bunlar arasında tinnitusun kötüleşme potansiyeli, işitme eşiklerinde olası bir değişiklik ve işitme cihazıyla temas noktasında olası cilt tahrişi yer alır. Multiflex Tinnitus Teknolojisi bu endişeleri en aza indirecek şekilde tasarlanmıştır. Bununla birlikte herhangi bir baş dönmesi, mide bulantısı, baş ağrısı veya kalp çarpıntısı yaşarsanız veya fark ederseniz, işitme cihazını kullanmayı derhal bırakmalı ve bir tıbbi, odyolojik veya başka bir işitme uzmanınıza danışmalısınız.

Herhangi bir işitme cihazında olduğu gibi, tinnitus terapi cihazının kötüye kullanılması potansiyel olarak bazı zararlı etkiler doğurabilir. Yetkisi kullanımı önlemek ve işitme cihazını çocukların ve evcil hayvanların erişemeyeceği bir yerde tutmak için özen gösterilmelidir.

DÜŞME UYARISI ÖZELLİĞİ

Düşme Uyarısı, düşmeniz veya düşmeyle ilgili olmayan bir olay yaşamazsınız durumunda başkalarını bilgilendirmek için kullanılabilir. Bu özellik, önceden tanımlanmış kişilere SMS gönderecek şekilde ayarlanabilir. Düşme Uyarısı, otomatik ve / veya manuel olarak başlatılan uyarılar gönderecek şekilde ayarlanabilir.

UYARI: Otomatik Uyanı düşmelerin %100'ünü algılayabilir.

UYARI: Otomatik Uyanı Hassasiyetini azaltmak, Düşme Uyarısı sisteminizin bazı düşmeleri algılamasını önleyebilir. Örneğin, Otomatik Uyan aşağıdaki durumlarda bir düşüşü algılayabilir:

- Hassasiyet ayarı kullanıcı için uygun değilse
- Düşüş çok yavaş ya da yavaş yavaş aşağı kayıyorsanız
- Ayağa kalkar ve düştükten hemen sonra yürümeye başlarsanız

UYARI: Otomatik Uyan yanlış uyarılar başlatır. Kişilerinize yanlış uyan metin mesajlarının gönderilmesini önlemek için uyarıyı akıllı telefonunuzdan veya işitme cihazınızın herhangi birindeki kullanıcı kontrol tuşuna basarak iptal edebilirsiniz.

UYARI: Düşme Uyarısı iletişim hatalarını azaltmak için:

- İşitme cihazı(lar)ınızın açık olması, eşleştirilmiş olması ve Bluetooth® bağlantısı kullanılarak akıllı telefonunuzla bağlanmış olması gerekir.
- Mobil cihaz açık olmalı ve işitme cihazı mobil uygulaması açık olmalıdır (ön planda veya arka planda).
- Mobil cihazın İnternet'e (hücresel ağ veya WiFi üzerinden) bağlantısı olmalıdır.

DİKKAT: Bu cihaz yüksek gürültülü ortamda işitme koruması sağlamaz.

Kısa veya uzun süreli aşırı yüksek seslere maruz kalıyorsanız bu cihazı çıkarmalısınız. Gürültülü bir yerdeyseniz, bu cihazı takmak yerine doğru işitme korumasını tercih etmelisiniz. Genel olarak, kulak tıkaçlarını gürültülü bir yerde kullanacaksanız, işitme cihazını çıkarmalı ve kulak tıkaçını kullanmalısınız.

DİKKAT: Ses çıkışı rahatsız edici veya acı verici olmamalıdır.

Ses çıkışı rahatsız edici derecede yüksek veya acı vericiyse sesi kısmalı veya cihazı çıkarmalısınız. Sesi sürekli olarak kısmanız gerekiyorsa, cihazınızın ayarlarını değiştirmeniz gerekebilir.

Uyarılar, Dikkat Edilecek Unsurlar ve Duyurular

DİKKAT: Kulağınızda bir parça sıkışırsa tıbbi yardıma ihtiyacınız olabilir.

İşitme cihazının herhangi bir parçası, örneğin prob ucu kulağınıza takılırsa ve parmaklarınızla kolayca çıkaramazsanız, en kısa sürede tıbbi yardım alın. Cimbiz veya pamuklu çubuk kullanmayı denememelisiniz çünkü bunlar parçayı kulağınızın daha da derinlerine itebilir ve kulak zarınıza veya kulak kanalınıza ciddi şekilde zarar verebilir.

NOT: İşitme cihazının performansından beklentileriniz

İşitme cihazı, işitme kaybı olan birçok kişiye fayda sağlayabilmektedir. Bununla birlikte, normal işitmeyi geri getirmeyeceğini ve yine de gürültüde duymakta zorluk çekebileceğini bilmelisiniz. Ayrıca bir işitme cihazı, işitme kaybına neden olan tıbbi bir durumu engellemeyecek veya iyileştirmeyecektir.

İşitme cihazı kullanmaya başlayan kişilerin bazen cihazlara alışması için birkaç haftaya ihtiyacı olabilmektedir. Benzer şekilde, birçok uzman cihaz eğitimi veya danışmanlığının kullanıcılara cihazlardan daha fazla yararlanmalarına yardımcı olabileceğini düşünüyor.

Her iki kulakta da işitme kaybınız varsa, özellikle sizi dinlemekten yoran durumlarda — örneğin gürültülü ortamlarda — her ikisinde de işitme cihazı kullandığınızda daha fazla fayda görebilirsiniz.

NOT: 18 Yaşından küçüklerde işitme kaybı.

18 Yaşından küçükler önce bir doktor, tercihen bir kulak burun boğaz doktoruna (KBB) görünmelidir, çünkü yetişkinlerden farklı ihtiyaçları olabilir.

- Doktor tıbbi durumları uygun şekilde belirleyecek ve tedavi edecektir.
- Doktor, işitme cihazı değerlendirilmesinde ayrı bir test için kişiyi odyoloğa yönlendirebilir.
- İşitme cihazı değerlendirilmesi, odyologun uygun işitme cihazını seçmesine ve takmasına yardımcı olacaktır.

İşitme kaybı olan 18 yaşından küçük bir kişi, işitme cihazı satın almadan önce tercihen bir KBB uzmanı tarafından tıbbi bir değerlendirilmeden geçmelidir. Tıbbi değerlendirilmenin amacı, işitmeyi etkileyecek ancak işitme cihazının kendi başına tedavi edemeyeceği tıbbi durumları belirlemek ve tedavi etmektir.

Tıbbi değerlendirilmenin ardından cihaz kullanımı uygunsa; doktor işitme kaybının tıbbi olarak değerlendirildiğine ve kişinin işitme cihazı adayı olduğuna dair bir reçete yazacaktır. Doktor, tıbbi değerlendirilmeden farklı olan ve uygun işitme cihazını belirlemeyi amaçlayan bir işitme cihazı değerlendirilmesi için kişiyi bir odyoloğa yönlendirebilir.

Odyolog, kişinin işitme cihazı ve cihazsız duyma performansı için bir işitme cihazı değerlendirilmesi yapacaktır. Bu, odyologun kişinin bireysel ihtiyaçlarına uygun bir işitme cihazı seçmesini ve takmasını sağlayacaktır. Odyolog ayrıca, 18 yaşından küçüklerde işitme kaybının dili gelişiminde ve eğitim ve sosyal gelişimde sorunlara yol açabileceği için değerlendirme ve rehabilitasyon da sağlayabilir. Odyolog, 18 yaşından küçüklerde işitme kaybının değerlendirilmesi ve rehabilitasyonunda yardımcı olmak için yeterli eğitim ve deneyime sahiptir.

Uyarılar, Dikkat Edilecek Unsurlar ve Duyurular

POTANSİYEL RİSK İŞİTME CİHAZI KULLANICILARI İÇİN ÖNEMLİ UYARI:

İyi bir sağlık uygulaması, işitme kaybı olan bir kişinin, işitme cihazı satın almadan önce lisanslı bir doktor (tercihen kulak hastalıkları konusunda uzmanlaşmış bir doktor) tarafından tıbbi bir değerlendirilmeye sahip olmasını gerektirir. Kulak hastalıkları konusunda uzmanlaşmış lisanslı doktorlara genellikle KBS uzmanı denir. Tıbbi değerlendirmenin amacı, işitmeyi etkileyebilecek tüm koşulların işitme cihazı satın alınmadan önce tanımlandığından ve tedavi edildiğinden emin olmaktır.

Tıbbi değerlendirmenin ardından doktorunuz size işitme kaybınızın tıbbi olarak değerlendirildiğini ve işitme cihazı aday olarak kabul edilebileceğinizi belirten yazılı bir reçete verecektir. Doktor, işitme cihazı değerlendirmesi için sizi uygun şekilde bir odyoloğa veya işitme cihazı uygulayıcısına yönlendirecektir.

Odyolog veya işitme cihazı uygulayıcısı, işitme cihazı ve cihazsız yeteneğinizi değerlendirmek için bir işitme cihazı değerlendirmesi yapacaktır. İşitme cihazı değerlendirmesi, odyologun veya uygulayıcısının bireysel ihtiyaçlarınıza göre bir işitme cihazı seçmesini ve kullanmasını sağlayacaktır.

Uyarılar, Dikkat Edilecek Unsurlar ve Duyurular

Bazı ülkelerde, reçeteli bir işitme cihazı satın almadan önce tıbbi bir değerlendirmeniz olmalıdır. Bazı ülkeler ise bir yetişkinin tıbbi değerlendirmeden feragat etmesine izin verir.

İşitme cihazı normal işitmeyi geri getirmeyecek ve organik koşullardan kaynaklanan işitme bozukluğunu önlemeyecek veya iyileştirmeyecektir. İşitme cihazının kullanımı işitme engelliğin yalnızca bir parçası olmakla birlikte işitme eğitimi ve dudak okuma eğitimi ile desteklenmesi gerekebilir. Çoğu durumda, işitme cihazının nadiren kullanılması, kullanıcıların bu cihazdan tam olarak yararlanmasına izin vermez.

Bazı işitme cihazı kullanıcıları, cep telefonu kullanırken işitme cihazlarında uğultu sesi olduğunu bildirir bu cep telefonu ile işitme cihazının uyumlu olmayabileceğini gösterir. Cep telefonlarının işitme cihazları için potansiyel gürültü kaynakları olduğu iyi bilinmektedir. Audibel işitme cihazlarınız, dijital kablolu cihazlara işitme cihazı bağlantısını tanımlayan ve ANSI C63.19- 2019 gerekliliklerinin yanı sıra kullanıcı uyumluluğu kriterlerini karşılayan iki standarda uygunluk açısından test edilmiştir.

DİKKAT: Aşağıdakiler, işitme cihazlarının kullanımıyla kaynaklanan potansiyel fizyolojik yan etkilere sahiptir. Aşağıdakiler meydana gelirse bir doktora danışın:

- İşitme Kaybının veya Kulak Çınlamasının Kötüleşmesi
- Isı (yanıklar), aşırma (kesikler ve çizikler), enfeksiyon, şoktan kaynaklanan ağrı veya rahatsızlık
- Dermal Alerjik Reaksiyon (iltihap, tahriş, şişme, akıntı)
- Aşırı kulak kiri üretimi (Kulak kiri)

Tebrikler!

**En iyi
hayatınız daha iyi
iřitmeyle bařlar.**

Yeni iřitme cihazlarınızı tanıtın.

Duymana sevindim.

Yeni iřitme cihazlarınızı tanımak ve iřitme deneyiminizden en iyi řekilde yararlanmak için bu yararlı kılavuzu kullanın.

Sonuçta, daha iyi duyduđunuzda, daha iyi yařarsınız. Yeni iřitme cihazlarınız sayesinde.

Mobil cihazınızı kullanarak daha fazla iřitme cihazı özelliđine sahip olabileceđinizi biliyor muydunuz? Ayrıntılar için **Uyumlu Mobil Uygulamanızı Kurma** kılavuzunuza bakın

Neler dahil

Bu kullanım kılavuzunda yer alan işitme cihazları (sizininki seçin):

- ITC/HS R*



- ITE R



Seri Numarası

Sol: _____

Sağ: _____

İşitme cihazlarınızda çıkarılabilir olmayan yerleşik, şarj edilebilir bir lityum iyon pil bulunur.

** HSR stili tüm portföylerde mevcut değildir.

İçindekiler tablosu

1. Uyarılar, Dikkat Edilecek Unsurlar ve Duyurular.....	2
2. İşitme Cihazlarınızı Tanıyın	
İşitme Cihazlarınızla Tanışın.....	14
İşitme Cihazı Kullanımı.....	16
İşitme Cihazı Bakımı.....	25
3. Sorun Giderme Kılavuzu.....	30
4. Ek Rehberlik	
Kullanım Amacı.....	34
FCC Bilgileri	38
Mevzuat Bilgileri.....	39

İşitme Cihazlarınızı Tanıyın

- İşitme Cihazlarınızla Tanışın
- İşitme Cihazı Kullanımı
- İşitme Cihazı Bakımı

İşitme cihazlarınızla tanışın

Genel bakış

1. Kullanıcı kontrol tuşu
2. Mikrofon
3. Şarj kontakları
4. Döner ses kontrolü (isteğe bağlı)
5. Ventilasyon
6. Filtre (aksesuar dahil) ve ses çıkışı
7. Seri numarası
8. Yan gösterge (konum değişebilir)
Kırmızı sağ kulak içindir, **MAVİ** sol kulak içindir

Kullanıcı kontrol seçenekleri




Kontrol yok





Kullanıcı kontrol tuşu




Döner ses kontrolü

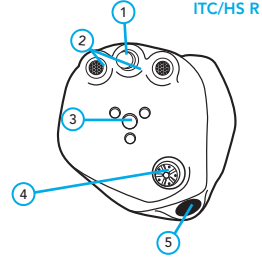

ITC/HS R

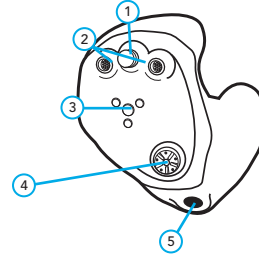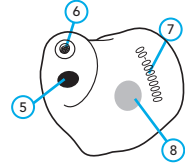

ITE R

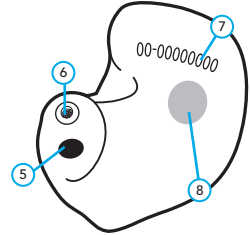

İşitme cihazı kullanımı

Adım 1: İşitme cihazlarınızı şarj edin

Şarj cihazınızı seçin:

☐ Özel Şarj Cihazı


☐ Premium Özel Şarj Cihazı

İşitme cihazlarınızı ilk kez kullanmadan önce tamamen şarj edin.
Özel Şarj Cihazınızın Kullanım Kılavuzuna bakın.

İşitme cihazı kullanımı

Adım 2: İşitme cihazlarınızı takın

1. İşitme cihazınızın dış kenarlarını kavrayarak kanal ucunu yavaşça kulak kanalınıza yerleştirin ve işitme cihazını geriye doğru döndürün.

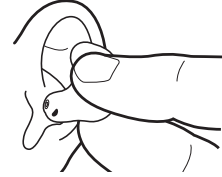


2. İşitme cihazına hafifçe basın yerine oturtun. Bitti!



İşitme cihazı kullanımı

Adım 3: İşitme cihazlarınızı çıkarın


1. İşitme cihazınızın dış kenarlarını kavrayın.

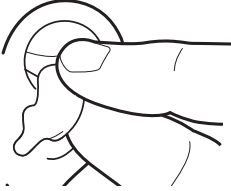

2. İşitme cihazını öne doğru döndürün ve dışarı doğru çekin.

Veya

İşitme cihazınızın çıkarma yardımcısı varsa: Bunu kavrayın ve işitme cihazını kulağınızdan yavaşça çıkarın.

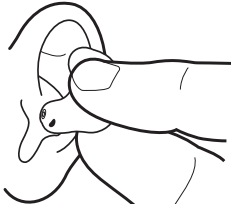

İşitme cihazı kullanımı

AÇIK/KAPALI

Açtığınızda işitme cihazınızdan bir gösterge çalacaktır.

AÇIK veya KAPALI:

- **AÇIK göstergesi** - tınısı artan bir dizi ton.
- **KAPALI göstergesi** - tınısı azalan bir dizi ton.

Şarj cihazınızı veya kullanıcı kontrolünüzü kullanarak işitme cihazlarınızı AÇIN /KAPATIN. S. 18'deki tabloya bakınız.

	AÇMAK için	KAPATMAK için
Şarj cihazı	Şarj cihazından çıkardıktan sonra her işitme cihazı AÇILIR. İşitme cihazınız AÇILMADAN ÖNCE 3 saniyelik bir gecikme meydana gelir ve kulagınıza yerleştirmek için zaman tanır.	Her işitme cihazını şarj yuvasına yerleştirdiğinizde (ve şarj etmeye başladığınızda) KAPANACAKTIR.
Kullanıcı kontrolü	Her işitme cihazı kullanıcı kontrolüne basarak KAPATILIR, kullanıcı kontrolüne tekrar basarak AÇILACAKTIR. İşitme cihazınız AÇILMADAN ÖNCE 3 saniyelik bir gecikme meydana gelir ve kulagınıza yerleştirmek için zaman tanır.	Kullanıcı kontrol tuşuna 3 saniye basılı tutarak işitme cihazını kapatın.

AÇMA/KAPATMA

Hatırlatma - İşitme cihazlarını şarj etmek için StarLink Şarj Cihazlarının harici bir güç kaynağına (ör. priz) takılması gerekir. StarLink Premium Mini Şarj Cihazlarının şarj edilmiş bir pili olmalı veya harici bir güç kaynağına takılmalıdır.

Pil göstergeleri

- **Düşük pil:** Pil seviyesi düşük olduğunda bir gösterge sesi duyulacaktır. O andan itibaren yaklaşık 5 dakika* pil seviyeniz kalacaktır.

NOT: Düşük pil göstergesi ile kapanma arasındaki geçen süre, çevresel gürültü seviyelerine ve ürünü kullanımınıza bağlı olarak değişecektir.

- **Pil kapanması:** Pil bitmeden hemen önce bir gösterge sesi de duyulabilir.

İşitme cihazı kullanımı

Beklenen pil çalışma süresi

Pil ömrü kablosuz kullanıma bağlı olarak değişir.

- **ITC/HS R**
- Akış olmadan: 42 saate kadar
- Akış ile: 36 saate kadar
- **ITE R**
- Akış olmadan: 42 saate kadar
- Akış ile: 36 saate kadar

Kullanıcı kontrol tuşu

İşitme cihazı kullanıcı kontrol tuşu, işitme cihazlarınızı elle kontrol etmenizi sağlar. Bu, birçok akıllı özelliği kullanmanıza olanak sağlamak için butonu programlayabilen işitme uzmanınız tarafından ayarlanır.

Kullanıcı kontrol tuşu 3 şekilde çalışır:

- **Kısa basın:** Kullanıcı kontrol tuşuna 1 saniye basın ve ardından bırakın.
- **Uzun basın:** Kullanıcı kontrol tuşun 3 saniye veya daha uzun süre basılı tutun.
- **Dokunma Kontrolü:** İşitme cihazınızdaki kullanıcı kontrolüne veya yakınına sıkıca iki kez dokunun.

İşitme cihazı kullanımı

Kullanıcı kontrolü	Akıllı özellik
Kısa basın (1 saniye)	
Uzun basın (3 saniye)	
Kontrol'e dokunun	

İşitme cihazlarınızı cep telefonunuzu veya diğer akıllı cihazlarınızı kullanarak da kontrol edebileceğinizi biliyor muydunuz? Daha fazla bilgi edinmek için *Uyumlu Mobil Uygulamanızı Ayarlama* kılavuzunuza bakın.

Telefon görüşmeleri ve işitme cihazları

İşitme cihazlarınız, mobil veya sabit telefonunuzdan yapılan aramaları karşılamak üzere tasarlanmıştır.

- **Sabit hat aramaları**
İşitme cihazı takarken sabit telefonunuzu kullanmak için işitme uzmanınızla konuşun. İşitme cihazlarınızda bir "telefon" programı ayarlamana yardımcı olabilir ve ipuçları sunabilirler.

- **Mobil aramalar**

Mobil telefon görüşmelerini işitme cihazlarınıza aktarmak için, dahil edilen "Uyumlu Mobil Uygulamanızı Ayarlama kılavuzuna bakın. Bu, akıllı telefonunuzu işitme cihazlarınıza nasıl bağlayacağınızı ("eşleştireceğinizi") gösterir.

Sorularınız mı var? İşitme uzmanınız yardımcı olabilir.

İşitme cihazınızı her zaman temiz tutun. Isı, nem ve yabancı maddeler düşük performansa neden olabilir.

1. Su, çözücüler, temizleme sıvıları veya yağlar kullanarak temizlemeyin. İşitme cihazınızı sökmeyin veya içine bir temizleme aracı sokmayın.
2. Kutusunun içinde bulunan temizleme aparatını kullanarak, mikrofon, filtre ve hoparlöründeki kalıntıları fırçalayın veya silin.
3. İşitme cihazı sert bir yüzeye düşerse, dış yüzeyinin veya kasanın kırılmasına ve / veya hasar görmesine neden olabilir. Bu, cihazın iç aksanında sorun yaratabilir.

Daha fazla bakım ve onarım ipucu için işitme uzmanınıza danışın.

Saklama ipuçları

İşitme cihazlarınızı takmadığınızda, bu saklama ipuçlarını kullanarak hasardan koruyun:

- **Saklama kutunuzun içinde saklayın**, böylece tekrar kullanıma hazır olurlar.
- **Serin ve kuru bir yer seçin**, ısı ve nemden uzak. Mümkünse doğrudan güneş ışığından kaçının.
- **İşitme cihazlarınızı kolayca bulabileceğinizden emin olun**, çocuklarınız ve evcil hayvanlarınız bulamasın. Bir komidin veya şifonyer idealdir.

Daha fazla saklama ipucu için işitme uzmanınıza danışın.

Mikrofon kapağını temizleme


İşitme cihazlarındaki özel mikrofon kapağı, mikrofonu kulak kiri ve döküntülerden korur. İşitme uzmanınızdan bunun temizlenmesi ve bakımı ile ilgili talimatlar isteyin.

Filtre değıştirme


Filtre, işitme cihazlarınızda kulak kirinin birikmesini önler. İşitme cihazlarınızda biriken pislik veya zayıf ses fark ederseniz bunları değıştirmeniz en iyisidir.

Filtre değıştirmek için:


1. Uygulama çubuğunun boş ucunu işitme cihazınızın kullanılmış filtresine doğrudan yerleřtirin ve sıkıca itin.

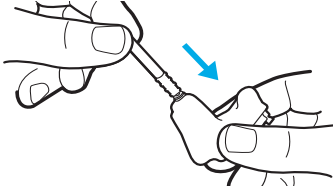

2. Uygulama çubuğunu kullanılmış filtreden çıkarmak için düz çekin ve bükmeyin.

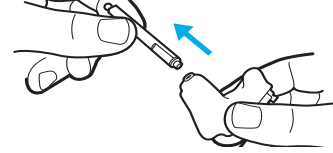


3. Uygulama çubuğunun diğeri ucunu kullanarak yeni filtreyi doğrudan işitme cihazına yerleřtirin ve sıkıca itin.

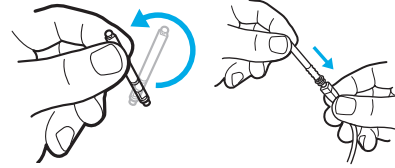

İşitme cihazı bakımı

1. Uygulama çubuğunu çıkarmak için düz bir şekilde çekin. Çevirmeyin. Uygulama çubuğunu atın.

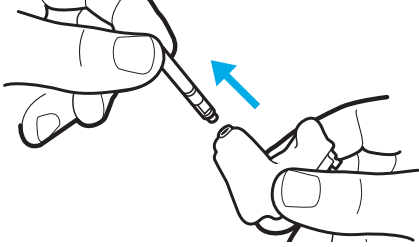

Sorun Giderme Kılavuzu

Sorun giderme kılavuzu

Herhangi bir nedenle işitme cihazınız düzgün çalışmıyorsa, kendiniz düzeltmeye ÇALIŞMAYIN. Yalnızca geçerli garantileri veya sigortaları ihlal etmenizin yanı sıra aynı zamanda daha fazla hasara da neden olabilirsiniz.

İşitme cihazınızın arızalanması veya kötü performans göstermesi durumunda olası çözümler için bu sorun giderme kılavuzuna bakın. Sorunlar devam ederse, tavsiye ve yardım için işitme uzmanınıza başvurun. İşitme uzmanınızın ofisinde veya kliniğinde birçok yaygın sorun çözülebilir.

Sorun giderme kılavuzu

Belirti	Olası nedenler	Çözümler
İşitme cihazları yeterince yüksek değil.	Mikrofon veya filtre tıkanmış olabilir.	1. İşitme cihazlarınızı temizleyin. 2. Gerektiğinde filtreyi değiştirin.
	Kir birikmesi.	Mikrofonu, filtreyi ve ses çıkışı temizleme fırçasıyla temizleyin.
	İşitme duyunuzda değişiklik.	İşitme uzmanınızla iletişime geçin.
Tutarsız işitme cihazı performansı.	Mikrofon veya filtre tıkanmış olabilir.	1. İşitme cihazlarınızı temizleyin. 2. Gerektiğinde filtreyi değiştirin.
	Yeniden başlatma gerekli.	1. İşitme cihazlarınızı şarj işlemi başlayana kadar şarj cihazına yerleştirin. 2. Şarj başladığında çıkarın. Bu, işitme cihazlarınızın "güç döngüsünü" başlatır.

Sorun giderme kılavuzu

Belirti	Olası Nedenler	Çözümler
Belirsiz ve bozuk işitme cihazı performansı.	Mikrofon veya filtre tıkanmış olabilir.	1. İşitme cihazlarınızı temizleyin. 2. Gerektiğinde filtreyi değiştirin.
	Ventilasyon engellendi.	Ventilasyon temizleyin.
	Arızalı işitme cihazları.	İşitme uzmanınızla iletişime geçin.
İşitme cihazlarınızdan ses gelmiyor.	Mikrofon veya filtre tıkanmış olabilir.	1. İşitme cihazlarınızı temizleyin. 2. Gerektiğinde filtreyi değiştirin.
	Şarj gereklidir.	İşitme cihazlarınızı, şarj cihazı gösterge ışıkları yanıp sönmekten sabit hale gelinceye kadar şarj cihazına yerleştirin.

Ek Rehberlik

- Kullanım Amacı
- FCC Bilgileri
- Düzenleyici Bilgiler

Kullanım amacı

KULLANIM AMACI:

Hava yolu ısıtma cihazı, ısıtma kaybını telafi etmek için tasarlanmış teknolojik bir cihazdır. Isıtma cihazları, hafif ila çok ileri dereceye kadar ısıtma kayıplarını tedavi etmeye uygun çoklu kazanç/ çıkış seviyesine sahiptir.

Isıtma cihazları, Uluslararası Elektromanyetik Uyumluluğun en katı Standartlarına uyacak şekilde tasarlanmıştır. Bununla birlikte, elektrik hattı rahatsızlıklarından, havaalanı metal dedektörlerinden, diğer tıbbi cihazlardan gelen elektromanyetik alanlardan, radyo sinyallerinden ve elektrostatik deşarjlardan kaynaklanan parazitlerle karşılaşmanız mümkündür.

Başka tıbbi cihazlar kullanıyorsanız veya defibrilatör veya kalp pili gibi vücuda yerleştirilebilir tıbbi cihazlar kullanıyorsanız ve ısıtma cihazlarınızın tıbbi cihazınızla etkileşime girebileceğinden endişeleniyorsanız, rahatsızlık riski hakkında bilgi için lütfen doktorunuza veya tıbbi cihazınızın üreticisine başvurun.

Isıtma cihazlarınız bir MRI prosedürü sırasında veya hiperbarik bir odada veya oksijen açısından zengin diğer ortamlarda giyilmemelidir.

Isıtma cihazlarınız, IEC 60601-1 tıbbi cihaz standardı kapsamında B Tipi uygulamalı parça olarak sınıflandırılır.

Isıtma cihazlarınız, kömür madenleri veya bazı kimya fabrikaları gibi patlayıcı ortamlarda çalışmak üzere resmi olarak onaylanmamıştır.

Isıtma cihazlarınız -10°C (14°F) ila +45°C (113°F), %10-%95 bağıl nem ve 70 kPa – 106 kPa sıcaklık, nem ve basınç aralıklarında saklanmalı ve taşınmalıdır. (deniz seviyesinden 1.200 ft (380 m) ile 10.000 ft (3.000 m) arasındaki yüksekliklere eşdeğerdir).

Şarj sıcaklığı aralığı 10°C (50°F) ile 40°C (104°F) arasında ve %10-%95 bağıl nem ile 70 kPa-106 kPa arasındadır.

Isıtma cihazlarınız, sizin için rahat olan 0°C (32°F) ila 40°C (104°F) sıcaklık aralığının ötesinde çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

⚠ DİKKAT:

- Ürün sıcaksa soğuyuncaya kadar dokunmayın.
- Ürün çalışmıyorsa parçalarını ayırmayın. Elektrik çarpması tehlikesi nedeniyle lütfen onarıma gönderin.
- Çocuklardan uzak tutun. Paketin içindeki kurutucu, temizleme aleti vb. dahil hiçbir şeyi yutmayın.
- Tüm kablolar ve AC adaptörleri Ulusal Tanınmış Test Laboratuvarı tarafından onaylanmalı veya listelenmelidir.

Klinik fayda

Isıtma cihazı, yaşam kalitesini artırmak amacıyla iletişimi kolaylaştırmaya yardımcı olmak ve konuşmanın daha iyi anlaşılmasını sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Klinik çalışma özeti

Klinik Çalışma Özeti: Hafiften ileri dereceye kadar ısıtma kaybı olan 18 yaş ve üzeri yetişkinleri kapsayan, ısıtma cihazı performansı ve faydası değerlendirilen bir klinik çalışmadır. Kullanıcılar, 2-6 haftalık cihaz kullanımı süresi boyunca, cihazları klinik beklentileri karşılayıp karşılamadığını belirlemek için çeşitli laboratuvar ve saha değerlendirmelerini tamamladı. Çalışmanın sonuçları, cihazların kullanıcıların ısıtma kayıplarına uygun amplifikasyon sağladığını ve kullanıcıların normatif verilerle tutarlı amplifikasyondan fayda algıladıklarını doğrulamaktadır. Çalışma sırasında ciddi veya kalıcı herhangi bir olumsuz olayla karşılaşılmadı.

Kullanım amacı

Uçaklarda kullanım

Isıtma Cihazlarınızda bulunabilecek kablolu özellikler uçaakta kullanılabilir çünkü ısıtma Cihazları, uçaktaki diğer kişisel elektronik cihazlara uygulanan kurallardan muaftır.

İŞİTME CİHAZINI AÇMAYIN, İÇİNDE SERVİS EDİLEBİLECEK PARÇA KULLANICI TARAFINDAN YOK EDİLEBİLİR.

Isıtma Uzmanları için Gerekli Multiflex Tinnitus Bilgileri

KULLANIM ENDİKASYONLARI

Multiflex Tinnitus Teknolojisi, tinnitus şikayeti olan hastaları rahatlatmak için Tinnitus Yönetim Programında kullanılacak sesleri üreten bir araçtır. Hedef kitle öncelikle 18 yaş üstü yetişkin nüfustur.

Multiflex Tinnitus Teknolojisi, geleneksel ısıtma kayıplarının yanı sıra tinnitus sorunu yaşayan hastaları da tedavi eden sağlık profesyonellerini hedeflemektedir. Multiflex Tinnitus Teknolojisinin ayarlanması, Tinnitus Yönetim Programına katılan bir ısıtma uzmanı tarafından yapılmalıdır.

ÖZELLİK AÇIKLAMASI

Multiflex Tinnitus Teknolojisi, ısıtma cihazına programlanan sesi üreten yazılımsal bir işlevdir. Isıtma cihazı üç çıkışa modundan birinde kullanılabilir: ısıtma cihazı olarak, tinnitus terapi cihazı olarak veya ısıtma cihazı ve tinnitus terapi cihazı olarak.

Etkinleştirildiğinde, Multiflex Tinnitus Teknolojisi sesi üretir ve hastanın ısıtma uzmanının bireysel olarak belirlenen ses terapi planı için uygun ayarları tasarlamasına ve programlamasına olanak tanır. Terapi planı, tinnitus gidermek için tinnitus yönetim programında kullanılmaktadır.

Multiflex Tinnitus Teknolojisi, frekansı ve genliği değişen geniş bantlı bir beyaz gürültü sinyali üretir. Bu özellikler, ısıtma uzmanı tarafından ayarlanabilir ve uzmanın hastanın ihtiyaçları ve konforu için tasarladığı reçeteli tedaviye özgüdür.

Hasta, sinyalin seviyesi üzerinde bir miktar kontrole sahip olabilir ve hasta, bu ayarlamayı, sinyalin konfor seviyesini ve sesini ısıtma uzmanına danışmalıdır.

⚠ **DİKKAT:** Cihaz Maksimum ses basıncı seviyesine ayarlanıp aşağıdaki önerileri aşan süreler boyunca takılırsa, hastanın ses enerjisine maruziyeti, gürültü maruziyet sınırlarını aşma potansiyeline sahiptir. Bu ısıtma cihazı, maksimum ses basıncı seviyesine ayarlandığında günde en fazla on altı (16) saat kullanım için tasarlanmıştır.

Hasta için

Tinnitus terapi cihazı, tinnitus terapisi için yeterli yoğunlukta ve bant genişliğinde gürültü üretmeyi amaçlayan elektronik bir cihazdır. Ayrıca dış sesleri ve konuşmaları duymaya yardımcı olarak da kullanılabilir.

Multiflex Tinnitus Teknolojisi ses üretmek için kullanılan bir özelliktir. Bu cihazın uygun danışmanlıkla ve/veya tinnitus yoklanması çeken hastaları rahatlatmak için bir tinnitus yönetim programında kullanılması önerilir.

Kullanım amacı

TİNNİTUS TERAPİSİ KAVRAMLARI VE FAYDALARI

Multiflex Tinnitus Teknolojisi, tinnitus terapi programının bir parçası olarak kullanılabilir.

Multiflex Tinnitus Teknolojisi işitme cihazı aracılığıyla beyaz gürültü sunar.

Multiflex Tinnitus Teknolojisi, işitme kaybınıza ve tercihlerinize göre programlanmıştır. İşitme uzmanınız, Multiflex Tinnitus Teknolojisinin ayarlarını ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde ayarlayabilir.

Multiflex Tinnitus Teknolojisi tinnitusunuzun geçici olarak rahatlatmasını sağlayabilir.

REÇETELİ KULLANIM

DİKKAT: Yasa işitme cihazı kullanımı için lisanslı bir doktor izniyle satılmasını sınırlamaktadır.

Ses üreten herhangi bir tinnitus terapi cihazının kullanımı yalnızca işitme uzmanınızın tavsiyesi üzerine ve ona danışarak yapılmalıdır. İşitme uzmanınız, işitme cihazını kişisel ihtiyaçlarınıza ve gereksinimlerinize uygun şekilde ayarlayacaktır. Reçete edilen tinnitus terapi programında kullanımı içermelidir.

Ayrıca işitme uzmanınız uygun takip ve bakımını da sunabilecektir. Bu tür bakımlarla ilgili işitme uzmanınızın tavsiyelerine ve talimatlarına uymanız önemlidir.

DİKKAT: Cihaz maksimum ses basıncı seviyesine ayarlanıp aşağıdaki önerileri aşan süreler boyunca kullanılırsa, hastanın yüksek sese maruz kalması gürültüyü maruz kalma sınırlarını aşma potansiyeline sahiptir. İşitme cihazı, maksimum ses basıncı seviyesine ayarlandığında günde en fazla on altı (16) saat kullanım için tasarlanmıştır.

Potansiyel Cihaz Kullanıcıları İçin Önemli Uyarı

İyi sağlık uygulamaları, tinnitusu olan bir kişinin, cihaz kullanmadan önce lisanslı bir hekim (tercihen KBB) tarafından tıbbi değerlendirilmeden geçmesini gerektirir. Kulak hastalıklarında uzmanlaşmış lisanslı doktorlarla genellikle KBB uzmanı denir.

Tıbbi değerlendirmenin amacı, cihazı kullanmadan önce tinnitusu etkileyebilecek tıbbi olarak tedavi edilebilir tüm durumların tanımlanmasını ve tedavi edilmesini sağlamaktır.

Kullanım amacı

Kullanım Hataları Uyarısı

Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından (kırılma, ezilme, düşmeye bağlı anızalar, kimyasal madde, ısı, sıvı, nem ve paslandırıcı veya oksitlendirici koşullara maruz kalma, yetkili servis dışında onarımlar, vb.) kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

Cihaz ile kullanılan pil, batarya, prob, kulak kalıbı, vs. gibi kullanım ömürlü malzemeler garanti kapsamı dışındadır.

TİNNİTUS TEKNİK VERİLER

Multiflex Tinnitus Teknolojisi Maksimum Çıkış = ANSI S3.22 veya IEC 60118-7'ye göre 2cc kuplörde ölçüldüğünde 87 dB SPL (tipik).

KABLOSUZ TEKNİK AÇIKLAMA

İşitme cihazlarınız, GFSK iletim modülasyonunu kullanarak maksimum 0 dBm etkili yayılma gücüne sahip, 2.4-2.4835 GHz frekans bandında çalışan Bluetooth Low Energy kablosuz teknolojisini kullanan bir radyo alıcı-vericisi içerir. Radyonun alıcı bölümünün bant genişliği 1,5 MHz'dir.

Bu işitme cihazı modeli aşağıdaki emisyon ve bağışıklık testlerine göre test edilmiş ve geçmiştir:

- CISPR 11'de belirtildiği gibi Grup 1 Sınıf B cihazı için IEC 60601-1-2 yayılan emisyon gereksinimleri.
- RF, IEC 60601-1-2 Tablo 9'da belirtildiği gibi iletim cihazlarından 80 MHz ile 2.7 GHz arasında 10 V/m alan seviyesinde ve ayrıca iletim cihazlarından daha yüksek alan seviyelerinde bağışıklık yaydı.
- 30 A/m alan seviyesinde güç frekansı manyetik alanlarına ve ayrıca 60601-1-2'deki tablo 11'de tanımlanan yakınlık manyetik alanlarına karşı bağışıklık.
- +/- 8 kV iletimli deşarj ve +/- 15 kV hava deşarjının ESD seviyelerine karşı bağışıklık.

Beklenen hizmet ömrü 3 yıldır.

Kullanım amacı

KABLOSUZ BİLDİRİMLER

FCC ID: EOA-24GENITELCH (solda); EOA-24GENITERCH (sağ)

IC: 6903A-24GENITELCH (solda); 6903A-24GENITERCH (sağ)

AB ADVERS OLAY RAPORLAMASI

Audibel cihazınızla ilgili olarak meydana gelen herhangi bir ciddi olay, yerel Audibel temsilcinize ve yerleşik olduğunuz Üye Devletin Yetkili Makamına bildirilmelidir. Ciddi olay, cihazın özelliklerinde ve/veya performansında meydana gelen herhangi bir arıza, bozulma veya cihazın kullanım kılavuzunda/etiketinde, Kullanıcının ölümüne veya sağlık durumunun ciddi şekilde bozulmasına neden olabilir VEYA bunun tekrarlanması durumunda bunu yapabilir.

Kullanım amacı

FCC Bilgileri

Bu cihazlar FCC kuralları ve ISED Kanada lisans muafiyeti RSS standartlarına uygundur. Çalışma aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) cihaz zararlı olabilecek engellemelere sebep olmaz, ve (2) bu cihaz, cihazın istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek parazitlenme de dahil olmak üzere alınan herhangi bir girişimi kabul etmemelidir.

NOT: Üretici bu cihaza yetkisiz modifikasyonlar tarafından sebep olunan herhangi bir radyo veya tv parazitlenmesinden sorumlu değildir. Bu tür modifikasyonlar kullanıcının cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılar.

Starkey Laboratories, Inc., RIC mRIC R/RIC RT'nin 2014/53/EU sayılı yönetmeliğin temel gerekliliklerine ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanının bir kopyası aşağıdaki adresten veya docs.starkeyhearingtechnologies.com adresinden alınabilir.

Starkey Laboratories, Inc., RIC mRIC R/RIC RT'nin değiştirildiği şekliyle İNGİLTERE Radyo Ekipmanı Yönetmeliği Si 2017'ye uygun olduğunu beyan eder. Birleşik Krallık Uygunluk Beyanının bir kopyası aşağıdaki adreslerden ve docs.starkeyhearingtechnologies.com alınabilir.

Mevzuat Bilgileri

Servis veya onarım için lütfen öncelikle işitme uzmanınızla iletişime geçin. Gerekirse işitme cihazlarınızı aşağıdaki adrese gönderebilirsiniz:

Starkey Laboratories, Inc.
6700 Washington Ave. South
Eden Prairie, MN 55344 USA
www.starkey.com



Starkey Laboratories (Almanya) GmbH
Weg beim Jäger 218-222
22335 Hamburg
Almanya

Birleşik Krallık Yetkili Kişisi:

Starkey UK
William F. Austin House
Pepper Rd, Hazel Grove
Stockport SK7 5BX, İngiltere
www.starkey.co.uk

 Elektronik ekipmanlardan kaynaklanan atıklar yerel düzenlemelere uygun olarak işlenmelidir.

 Kullanım kılavuzuna bakın.

 Kuru tutun.

Eski Elektronik Cihazların Geri Dönüşümüne İlişkin Talimatlar

Starkey Laboratories, Inc., işitme cihazlarınızın yerel elektronik geri dönüşüm/atık süreci yoluyla imha edilmesini AB'nin zorunlu kıldığı ve yerel toplum yasalarının gerektirebileceği teşvik etmektedir.

Aşağıdaki talimatlar imha/geri dönüşüm personelinin yararına verilmiştir. Lütfen işitme cihazlarınızı atarken bu kılavuzu da ekleyin.



MDR 760129 R000

Mevzuat Bilgileri

Sembol	Sembol Anlamı	Uygulanabilir Standart	Sembol Numarası
	Üretici	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.1
	Avrupa Topluluğu'ndaki Yetkili Temsilci	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.2
	Üretim Tarihi	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.3
	Katalog Numarası	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.6
	Seri Numarası	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.7
	Tıbbi Cihaz	BS EN ISO 15223-1:2021	5.7.7
	Kuru Tutun	BS EN ISO 15223-1:2021	5.3.4
	Sıcaklık Sınırı	BS EN ISO 15223-1:2021	5.3.7
	Nem Sınırı	BS EN ISO 15223-1:2021	5.3.8
	Dikkat	BS EN ISO 15223-1:2021	5.4.4
	Genel Uyarı İşareti	EC 60601-1, Reference no. Table D.2, Safety sign 2	ISO 7010-W001
	Kullanım kılavuzuna/kitapçığına bakın	EC 60601-1, Reference no. Table D.2, Safety sign 10	ISO 7010-M002
	Ayrı Toplayın	DIRECTIVE 2012/19/EU (WEEE)	Annex IX
	Sınıf II Ekipmanı	IEC 60417 Reference no. Table D.1	Symbol 9 (IEC 60417-5172)
	Mevzuata Uygunluk İşareti (FCM)	AS/NZS 4417.1:2012	N/A
	Giteki İşareti	Japanese Radio Law	N/A
	Doğru Akım	IEC 60601-1 Reference no. Table D.1	IEC 60417-5031
	Geri Dönüşüm Sembolü	European Parliament and Council Directive 94/62/EC	Annex I-VII

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

[illegible]

Türkiye Distribütörü



Duyumed İşitme Cihazları A.Ş.

Fulya Mah. Büyükdere Cad. No: 74 Torun Center A Blok Ofis: 176

Şişli İstanbul

0 850 474 21 21

info@duyumed.com | www.duyumed.com



Basım Tarihi: 31.10.2023

Made for Apple rozetinin kullanılması, bir aksesuarın özellikle rozette belirtilen Apple ürünlerine bağlanacak şekilde tasarlandığı ve geliştirici tarafından Apple performans standartlarını karşıladığının onaylandığı anlamına gelir. Apple, bu aygıtın çalışmasından veya güvenlik ve düzenleme standartlarına uygunluğundan sorumlu değildir. Apple, Apple logosu, iPhone, iPad ve iPod touch, Apple Inc.'in ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalardır. iOS, Cisco'nun ABD ve diğer ülkelerdeki ticari markası veya tescilli ticari markasıdır ve Lisanslı olarak kullanılmaktadır.

Google Play, Google LLC'nin ticari markasıdır.

Bluetooth® kelime markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc.'e ait tescilli ticari markalardır ve bu tür markaların Starkey tarafından her türlü kullanımı lisansa tabidir.

Intrigue ve Audibel, Starkey Laboratories, Inc.'in ticari markalarıdır.

©2023 Starkey Laboratories, Inc. Tüm Hakları Saklıdır. P00001425 2/23 BKL3157-00-EN-TR
Patent: www.starkey.com/patents