

Audibel Intrigue AI
Yapay Zeka

Kablosuz İşitme Cihazı Kullanım Kılavuzu



Kablosuz Ürünler

RIC (Kanal İçi Alıcı) 312

Uyarılar, Dikkat Edilecek Unsurlar ve Duyurular

GEREKLİ İŞİTME CİHAZI BİLGİLERİ

Aşağıdaki ek bilgiler ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) düzenlemelerine

uygun olarak sağlanmıştır:



UYARI: 18 yaşından küçükler işitme cihazı kullanmadan önce doktora gitmelidir.

18 Yaşından küçüklerin özel bakıma ihtiyacı vardır ve işitme cihazını tıbbi değerlendirmesini yaptırmadan kullanmak işitme kaybını kötüleştirebilir. 18 yaşından küçük bir işitme cihazı kullanıcısı, yakın zamanda bir doktordan, tercihen bir kulak burun boğaz doktorundan (KBB) tıbbi bir değerlendirme yaptırmalıdır. İşitme cihazı kullanmadan önce bir doktor, cihazın kullanımının uygun olduğunu belirlemelidir.



İşitme cihazı uygulayıcılarına UYARI:

Potansiyel bir işitme cihazı kullanıcısına, kullanıcıyla ilgili mevcut diğer bilgileri sorgulayarak, durumunu gözlemleyerek veya gözden geçirerek belirlerseniz, işitme cihazını dağıtmadan önce derhal bir doktora, tercihen KBB gibi bir işitme uzmanına danışmasını tavsiye etmelisiniz, potansiyel kullanıcı için koşullar aşağıda belirtilmiştir:

- Doğuştan veya travmatik olarak deformite,
- Son 6 ay içinde kulaktan sıvı, irin veya kan gelmesi
- Kulakta ağrı veya rahatsızlık,
- Aşırı kulak kiri öyküsü veya kulak kanalında bir şey olduğuna dair şüphe
- Yakın zamanda veya uzun süredir devam eden baş dönmesi
- Son 6 ay içinde aniden hızla kötüleşen veya dalgalanan işitme kaybı
- Yalnızca tek kulakta işitme kaybı veya çınlama (tinnitus) veya kulaklar arasında gözle görülür işitme farklılığı
- Odyometrik hava-kemik aralığı 500 Hz, 1000 Hz ve 2000 Hz'de 15 dB'ye eşit veya daha büyük olması



UYARI: İşitme cihazı uygulayıcısına, maksimum ses basıncı seviyesi 132 dB SPL'in üzerinde ise;

İşitme cihazı kullanıcısının kalan işitmesini etkileyebileceğinden, maksimum ses basıncı seviyesi 132 dB SPL'yi aşan bir işitme cihazı seçerken ve takarken dikkat etmelisiniz.

Uluslararası Kullanım

İşitme cihazlarınız ülkenize veya bölgenize özgü bir radyo frekansında çalışmak üzere onaylanmıştır ve ülkeniz veya bölgeniz dışında kullanımı için onaylanmamış olabilir. Uluslararası seyahat sırasında çalıştırmanın diğer elektronik cihazlarda parazite neden olabileceğini veya diğer elektronik cihazların işitme cihazlarınızda parazite neden olabileceğini unutmayın.

Yönetmelikler gereği aşağıdaki uyarılar sağlanamaz gerekmektedir:



UYARI: Kablosuz işitme cihazlarının doğrudan diğer elektronik ekipmanların yanında kullanılmasından kaçınılmalıdır çünkü bu durum uygunsuz performansa neden olabilir. Böyle bir kullanım gerekliyse; işitme cihazlarınızın ve diğer ekipmanlarınızın normal şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol edin.



UYARI: İşitme cihazlarınızın üreticisi tarafından sağlananlar dışındaki aksesuarların, bileşenlerin veya yedek parçaların kullanılması, elektromanyetik emisyonların artmasına, elektromanyetik bağışıklığın azalmasına neden olabilir ve performansın düşmesine neden olabilir.



UYARI: Taşınabilir Radyo Frekans iletışim ekipmanı işitme cihazınıza 30 cm'den (12 inç) daha yakın kullanılırsa işitme cihazınızın performansında düşüş meydana gelebilir.

Böyle bir durumda iletışim ekipmanından uzaklaşın.



UYARI: İşitme cihazının stabilitesi normal kullanım için tasarlanmıştır. Cihazın kırılmasına veya cihazın bileşeninin kopmasına neden olabilecek bir işitme cihazı takarken kulağa fiziksel etkilere kaçın. Bu, kulak kanalının yırtılmasına veya kulak zarının delinmesine neden olabilir. Bu meydana gelirse, değerlendirme ve güvenli bir şekilde çıkarılması için bir doktora görünmeniz şiddetle tavsiye edilir.



UYARI: İşitme cihazı sert bir yüzeye düşerse, işitme cihazının kırılmasına veya hasar görmesine neden olabilir. Buna, cihazın aksamına dahildir. Kulağınıza yerleştirmeden önce işitme cihazının sağlam olduğundan emin olun. Cihazın hasarlı olduğunu tespit ederseniz, kullanmayı bırakın ve işitme uzmanınıza görün.



UYARI: Çıkarma yardımcısına baskı uygulanması, cihazın kırılmasına neden olabilir. Çıkarma yardımcısı kırılırsa ve cihazı dikkatlice çıkaramazsanız, güvenli bir şekilde çıkarılması için bir hekime görünmeniz önerilir.



İŞİTME BAKIMI UZMANINA UYARI

Bir işitme uzmanı, olası bir işitme cihazı kullanıcısına, bir işitme cihazı kullanmadan önce derhal lisanslı bir hekime (tercihen bir KBB uzmanına) danışmasını tavsiye etmelidir; eğer işitme uzmanı, potansiyel kullanıcıyla ilgili sorgulayarak, durumunu gözlemleyerek veya gözden geçirerek diğer mevcut bilgiler yoluyla potansiyel kullanıcı için koşullar aşağıda belirtilmiştir:

- Kulağın gözle görülür konjenital veya travmatik deformitesi
- Son 90 gün içinde kulaktan aktif drenaj öyküsü
- Son 90 gün içinde ani veya hızla ilerleyen işitme kaybı öyküsü
- Akut veya kronik baş dönmesi
- Son 90 gün içinde ani veya yeni başlayan tek taraflı işitme kaybı



UYARI: Tinnitus terapi sesi üreten cihazların kullanımıyla ilişkili bazı endişeler var. Bunlar arasında tinnitusun kötüleşme potansiyeli, işitme eşiklerinde olası bir değişiklik ve işitme cihazıyla temas noktasında olası cilt tahrişi yer alır.

Multiflex Tinnitus Teknolojisi bu endişeleri en aza indirecek şekilde tasarlanmıştır. Bununla birlikte herhangi bir baş dönmesi, mide bulantısı, baş ağrısı veya kalp çarpıntısı yaşarsanız veya fark ederseniz, işitme cihazını kullanmayı derhal bırakmalı ve bir tıbbi, odyoloji veya başka bir işitme uzmanınıza danışmalısınız.

Herhangi bir işitme cihazında olduğu gibi, tinnitus terapi cihazının kötüye kullanılması potansiyel olarak bazı zararlı etkiler doğurabilir. Yetkisiz kullanımı önlemek ve işitme cihazını çocukların ve evcil hayvanların erişemeyeceği bir yerde tutmak için özen gösterilmelidir.

DÜŞME UYARISI ÖZELLİĞİ

Düşme Uyarısı, düşmeniz veya düşmeyle ilgili olmayan bir olay yaşamanız durumunda başkalarını bilgilendirmek için kullanılabilir. Bu özellik, önceden tanımlanmış kişilere SMS gönderecek şekilde ayarlanabilir. Düşme Uyarısı, otomatik ve / veya manuel olarak başlatılan uyanılar gönderecek şekilde ayarlanabilir.



UYARI: Otomatik Uyanı düşmelerin %100'ünü algılamayabilir.



UYARI: Otomatik Uyanı Hassasiyetini azaltmak, Düşme Uyarısı sisteminizin bazı düşmeleri algılamasını önleyebilir. Örneğin, Otomatik Uyanı aşağıdaki durumlarda bir düşüşü algılamayabilir:

- Hassasiyet ayarı kullanıcı için uygun değilse
- Düşüş çok yavaş ya da yavaş yavaş aşağı kayıyorsanız
- Ayağa kalkar ve tam bir yürüyüşten hemen sonra yürümeye başlıyorsanız



UYARI: Otomatik Uyanı yanlış uyanılar başlatabilir. Kişilerinize yanlış uyanı mesajlarının gönderilmesini önlemek için uyanıyı akıllı telefonunuzdan veya işitme cihazınızın herhangi birindeki kullanıcı kontrol tuşuna basarak iptal edebilirsiniz.



UYARI: Düşme Uyarısı iletişim hatalarını azaltmak için:

- İşitme cihaz(lar)ınızın açık olması, eşleştirilmiş olması ve Bluetooth® bağlantısı kullanılarak akıllı telefonunuzla bağlanmış olması gerekir.
- Mobil cihaz açık olmalı ve işitme cihazı mobil uygulaması açık olmalıdır. (ön planda veya arka planda).
- Mobil cihazın İnternet'e (hücresel ağ veya WiFi üzerinden) bağlantısı olmalıdır.



DİKKAT: Bu cihaz yüksek gürültülü ortamda işitme

koruması sağlamaz.

Kısa veya uzun süreli aşırı yüksek seslere maruz kalıyorsanız bu cihazı çıkarmalısınız. Gürültülü bir yerdeyseniz, bu cihazı takmak yerine doğru işitme korumasını tercih etmelisiniz. Genel olarak, kulak tıkaçlarını gürültülü bir yerde kullanacaksanız, işitme cihazınızı çıkarmalı ve kulak tıkaçını kullanmalısınız.

 DİKKAT: Ses çıkışı rahatsız edici veya acı verici

olmamalıdır.

Ses çıkışı rahatsız edici derecede yüksek veya acı vericiyse sesi kısmalı veya cihazı çıkarmalısınız. Sesi sürekli olarak kısmanız gerekiyorsa, cihazınızın ayarlarını değiştirtmeniz gerekebilir.

 DİKKAT: Kulağınıza bir parça sıkışırsa tıbbi yardıma ihtiyacınız olabilir.

İşitme cihazınızın herhangi bir parçası, örneğin prob ucu kulağınıza takılırsa ve parmaklarınızla kolayca çıkaramazsanız, en kısa sürede tıbbi yardım alın. Cımbız veya pamuklu çubuk kullanmayı denememelisiniz çünkü bunlar parçayı kulağınızın daha da derinlerine itebilir ve kulak zarınıza veya kulak kanalınıza ciddi şekilde zarar verebilir.

NOT: İşitme cihazının performansından beklentileriniz

İşitme cihazı, işitme kaybı olan birçok kişiye fayda sağlayabilmektedir. Bununla birlikte, normal işitmeyi geri getiremeyeceğini ve yine de gürültüde duymakta zorluk çekebileceğinizi bilmelisiniz. Ayrıca bir işitme cihazı, işitme kaybına neden olan tıbbi bir durumu engellemeyecek veya iyileştirmeyecektir.

İşitme cihazı kullanmaya başlayan kişilerin bazen cihazlara alışması için birkaç haftaya ihtiyacı olabilmektedir. Benzer şekilde, birçok uzman cihaz eğitimi veya danışmanlığının kullanıcıları cihazlardan daha fazla yararlanmalarına yardımcı olabileceğini düşünüyor.

Her iki kulakta da işitme kaybınız varsa, özellikle sizi dinlemekten yoran durumlarda — örneğin gürültülü ortamlarda - her ikisinde de işitme cihazı kullandığınızda daha fazla fayda görebilirsiniz.

NOT: 18 Yaşından küçüklerde işitme kaybı.

18 Yaşından küçükler önce bir doktora, tercihen bir kulak burun boğaz doktoruna (KBB) görünmelidir, çünkü yetişkinlerden farklı ihtiyaçları olabilir.

- Doktor tıbbi durumları uygun şekilde belirleyecek ve tedavi edecektir.
- Doktor, işitme cihazı değerlendirilmesinde ayrı bir test için kişiyi odyoloğa yönlendirebilir.
- İşitme cihazı değerlendirmesi, odyologun uygun işitme cihazını seçmesine ve takmasına yardımcı olacaktır.

İşitme kaybı olan 18 yaşından küçük bir kişi, işitme cihazı satın almadan önce tercihen bir KBB uzmanı tarafından tıbbi bir değerlendirilmeden geçmelidir. Tıbbi değerlendirmenin amacı, işitmeyi etkileyebilecek ancak işitme cihazının kendi başına tedavi edemeyeceği tıbbi durumları belirlemek ve tedavi etmektir.

Tıbbi değerlendirmenin ardından ve uygunsa, doktor işitme kaybının tıbbi olarak değerlendirildiğine ve kişinin işitme cihazı adayı olduğuna dair bir reçete yazacaktır. Doktor, tıbbi değerlendirmeden farklı olan ve uygun işitme cihazını belirlemeyi amaçlayan bir işitme cihazı değerlendirmesi için kişiyi bir odyoloğa yönlendirebilir.

Odyolog, kişinin işitme cihazlı ve cihazsız duyma performansı için bir işitme cihazı değerlendirmesi yapacaktır. Bu, odyologun kişinin bireysel ihtiyaçlarına uygun bir işitme cihazı seçmesini ve takmasını sağlayacaktır. Odyolog ayrıca, 18 yaşından küçüklerde işitme kaybının dil gelişiminde ve eğitim ve sosyal gelişimde sorunlara yol açabileceği için değerlendirmeye ve rehabilitasyon da sağlayabilir. Odyolog, 18 yaşından küçüklerde işitme kaybının değerlendirilmesi verehabiliteasyonunda yardımcı olmak için yeterli eğitim ve deneyime sahiptir.

POTANSİYEL Rx İŞİTME CİHAZI KULLANICILARI İÇİN ÖNEMLİ UYARI:

İyi bir sağlık uygulaması, işitme kaybı olan bir kişinin, işitme cihazı satın almadan önce lisanslı bir doktor (tercihen kulak hastalıkları konusunda uzmanlaşmış bir doktor) tarafından tıbbi bir değerlendirmeye sahip olmasını gerektirir. Kulak hastalıkları konusunda uzmanlaşmış lisanslı doktorlara genellikle KBB uzmanı denir. Tıbbi değerlendirmenin amacı, işitmeyi etkileyebilecek tüm koşulların işitme cihazı satın alınmadan önce tanımlandığından ve tedavi edildiğinden emin olmaktır.

Tıbbi değerlendirmenin ardından doktorunuz size işitme kaybınızın tıbbi olarak değerlendirildiğini ve işitme cihazı adayı olarak kabul edilebileceğinizi belirten yazılı bir reçete verecektir. Doktor, işitme cihazı değerlendirmesi için sizi uygun şekilde bir odyoloğa veya işitme cihazı uygulayıcısına yönlendirecektir.

Odyolog veya işitme cihazı uygulayıcısı, işitme cihazlı ve cihazsız yeteneğinizi değerlendirmek için bir işitme cihazı değerlendirmesi yapacaktır. İşitme cihazı değerlendirmesi, odyologun veya uygulayıcısının bireysel ihtiyaçlarınızı göre bir işitme cihazı seçmesini ve kullanmasını sağlayacaktır.

Bazı ülkelerde, reçeteli bir işitme cihazı satın almadan önce tıbbi bir değerlendirmeniz olmalıdır. Bazı ülkeler ise bir yetişkinin tıbbi değerlendirmeden feragat etmesine izin verir.

İşitme cihazı normal işitmeyi geri getirmeyecek ve organik koşullardan kaynaklanan işitme bozukluğunu önlemeyecek veya iyileştirmeyecektir.

İşitme cihazının kullanımı işitme engelliğinin yalnızca bir parçası olmakla birlikte işitme eğitimi ve dudak okuma eğitimi ile desteklenmesi gerekebilir. Çoğu durumda, işitme cihazının nadiren kullanılması, kullanıcının bu cihazdan tam olarak yararlanmasına izin vermez.

Bazı işitme cihazı kullanıcıları, cep telefonu kullanırken işitme cihazlarında uğultu sesi olduğunu bildirir bu cep telefonu ile işitme cihazının uyumlu olmayabileceğini gösterir. Cep telefonlarının işitme cihazları için potansiyel gürültü kaynakları olduğu iyi bilinmektedir. Audibel işitme cihazlarınız, dijital kablosuz cihazlara işitme cihazı bağlantısını tanımlayan ve ANSI C63.19- 2019 gerekliliklerinin yanı sıra kullanıcı uyumluluğu kriterlerini karşılayan iki standarda uygunluk açısından test edilmiştir.

DİKKAT: Aşağıdakiler, işitme cihazlarının kullanımından kaynaklanan potansiyel fizyolojik yan etkilerdir. Aşağıdakiler meydana gelirse bir doktora danışın:

- İşitme Kaybının veya Kulak Çınlamasının Kötüleşmesi
- Isı (yanıklar), aşınma (kesikler ve çizikler), enfeksiyon, şoktan kaynaklanan ağrı veya rahatsızlık
- Dermal Alerjik Reaksiyon (iltihap, tahriş, şişme, akıntı)
- Aşırı kulak kiri üretimi (Kulak kiri)

Yeni işitme cihazlarınız için tebrikler!

Yeni işitme cihazlarınızı tanımak ve işitme deneyiminizden en iyi şekilde yararlanmak için bu yararlı kılavuzu kullanın.

Sonuçta, daha iyi duyduğunuzda, daha iyi yaşarsınız. Yeni işitme cihazlarınız sayesinde.

**Bu kullanım kılavuzunda yer alan işitme cihazları
(kendinizinkini seçin):**

• RIC 312

Seri Numarası

Sol: _____

Sağ: _____

İşitme cihazım bir:

- 312 pil (RIC) – Kahverengi

Mobil cihazınızı kullanarak daha fazla işitme cihazı özelliği alabileceğinizi biliyor muydunuz? Ayrıntılar için **Uyumlu Mobil Uygulamanızı Kurma** kılavuzunuza bakın.

İçindekiler Tablosu

1. Uyarılar, Dikkat Edilecek Unsurlar ve

Duyurular	2
-----------------	---

2. İşitme Cihazlarınızı Tanıyın

İşitme Cihazlarınızla Tanışın	10
İşitme Cihazı Kullanımı	12
İşitme Cihazı Bakımı	20
Sorun Giderme Kılavuzu	24

3. Ek Rehberlik


Kullanım Amacı	27
FCC Bilgileri	31
Mevzuat Bilgileri	32

İşitme Cihazlarınızla Tanışın

Genel bakış

1. Hoparlör kablosu
2. Mikrofonlar
3. Kullanıcı kontrol tuşları
4. Hoparlör
5. Filtre (aksesuar dahil)
6. Üretici, model adı ve seri numarası
7. Parmak izi (pil kapağında bulunur)
8. Yan gösterge
Kırmızı sağ kulak içindir, **MAVİ** sol kulak içindir
9. Pil bölmesi (açma /kapama kontrolü)
10. Tutma kilidi (isteğe bağlı)
11. Prob (dahil aksesuar)
12. Hoparlör göstergesi
Kırmızı sağ kulak içindir, **MAVİ** sol kulak içindir
13. Özel kulak kalıbı (isteğe bağlı)
14. Özel power kulak kalıbı (isteğe bağlı)

RIC 312

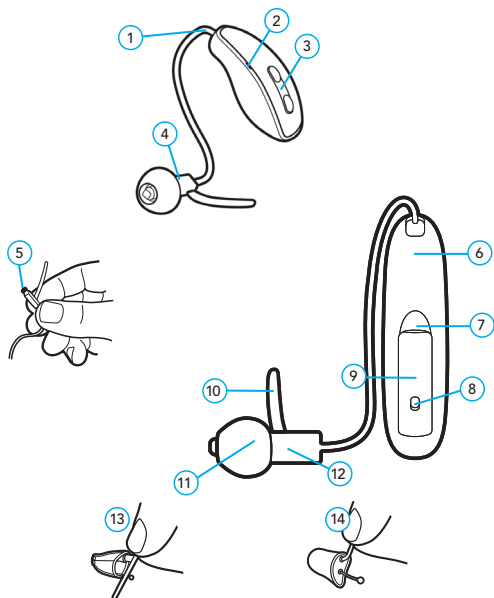


İşitme Cihazlarınızı Kullanın

Piller

İşitme cihazınız güç kaynağı olarak bir pil kullanır. Pil boyutu ambalaj üzerindeki kahverengi (312) renk kodundan anlaşılabilir.

Pili takmak veya değiştirmek için:

- Parmak ucunuzu pil kapağına yerleştirin.

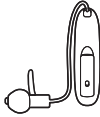

- Pil kapağını yavaşça açın ve eski pili çıkarın.



- Yeni pilden renkli etiketi çıkarın.
En iyi sonuçlar için, pili takmadan önce etiketi çıkardıktan sonra 3-5 dakika bekleyin.



- Pil kapağına “+” tarafı yukarı bakacak şekilde yerleştirin.



- Pil kapağını kapatın.



Pil göstergeleri

Pil voltajı düşük olduğunda bir gösterge sesi duyulur. Pili değiştirmek için yaklaşık 30 dakikanız vardır. Pil çalışmayı durdurmadan hemen önce de bir gösterge sesi duyulabilir.

Faydalı pil ipuçları

- **ASLA PİL KAPAĞINI KAPATMAK İÇİN ZORLAMAYIN;** bu ciddi hasara yol açabilir. Kapak güvenli bir şekilde kapanmazsa, pilin doğru şekilde yerleştirildiğini kontrol edin.
- Pil kapağını çok fazla açmayın, aksi takdirde hasar meydana gelebilir.
- Kullanılmış pilleri derhal uygun atık veya geri dönüşüm konteynerine atın.
- * Piller boyut ve performans açısından farklılık gösterir. İşitme uzmanınız, kullanım ömrü tahminleri ve doğru boyut ve türü kullandığınızı doğrulanması için en iyi kaynağınızdır.



UYARILAR

Piller yutulduğunda tehlikelidir. Pillerin kazara yutulmasını önlemeye yardımcı olmak için:


- Çocukların ve evcil hayvanların erişemeyeceği yerlerde saklayınız.
- İlaçlarınızı almadan önce kontrol edin; pillerin haplarla karıştırıldığı biliniyor.
- Pilleri asla ağızınıza koymayın, çünkü kolayca yutulabilirler.

AÇMAK için:

Bir pil takın ve pil kapağını tamamen kapatın. İşitme cihazınızda birkaç saniye sürebilecek bir güç açma gecikmesi vardır. İşitme cihazınızın açık olduğunu belirten bir ton duyabilirsiniz.

İşitme cihazlarınızı takmak için:

1. İşitme cihazınızın dış kenarlarından tutarak kanal ucunu kulak kanalınıza nazıkçe yerleştirin ve işitme cihazını geriye doğru döndürün.

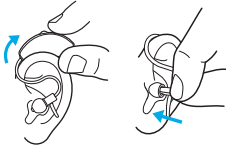

2. İşitme cihazını yavaşça yerine bastırın. Tamamdır!
3. İsteğe bağlı tutma kilidini kulağınızın alt kıvrımına sokun, böylece uç başınızın arkasına doğru bükülür. Tamamdır!




İşitme cihazlarınızı çıkarmak için:

1. İşitme cihazınızın dış kenarlarından tutun.



2. İşitme cihazını öne doğru döndürün ve dışarı doğru çekin.

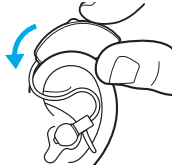

KAPATMAK için:

Pil kapağını, pilin pil temas noktalarına temas etmeyeceği noktaya kadar açın.

Otomatik AÇMA/KAPAMA

İşitme cihazınız, pil tasarrufu için otomatik olarak düşük güç durumuna geçme yeteneğini destekleyebilir. Bu kontrol, işitme uzmanınız tarafından veya işitme cihazı mobil uygulaması aracılığıyla ayarlanabilir.

İşitme cihazınızı düz, sabit bir yüzeye koyun (örneğin bir masa) ve yaklaşık 15 dakika sonra düşük güç durumuna geçecektir. Normal işitme cihazı işlevine devam etmek için işitme cihazınızı alın ve kulağınıza yerleştirin. İşitme cihazınız bu hareketi algılayacak ve tekrar açılacaktır. İşitme cihazınızın açık olduğunu belirten bir ses duyabilirsiniz.

	AÇMAK için	KAPATMAK için
Pil kapağı	Pilinizi takın ve pil kapağını güvenli bir şekilde kapatın. İşitme cihazınız AÇILMADAN önce 3 saniyelik bir gecikme meydana gelir. Bu, onu kulağınıza yerleştirmek için zaman tanır.	Pil kapağını açtığınızda (ve pil artık pil temas noktalarına temas etmediğinde) her işitme cihazı KAPANACAKTIR.
Kullanıcı kontrol tuşları	Her işitme cihazı kullanıcı kontrol tuşuna basarak KAPATILIR, kullanıcı kontrol tuşuna tekrar basarak AÇILACAKTIR. İşitme cihazınız AÇILMADAN önce 3 saniyelik bir gecikme meydana gelir ve bu da onu kulağınıza yerleştirmek için zaman tanır.	Her bir işitme cihazını, kullanıcı kontrol tuşuna 3 saniye basılı tutarak KAPATIN.

Pil göstergeleri

- **Düşük pil:** Pil seviyesi düşük olduğunda bir gösterge sesi duyulacaktır. O andan itibaren yaklaşık 5 dakika* pil seviyeniz kalacaktır.

NOT: *Düşük pil göstergesi ile kapanma arasındaki geçen süre, çevresel gürültü seviyelerine ve cihazı kullanımınıza bağlı olarak değişecektir.*

- **Pil kapanması:** Pil bitmeden hemen önce bir
- gösterge sesi de duyulabilir.

Beklenen pil çalışma süresi

Pil ömrü, kablosuz kullanıma göre değişir.

- **RIC 312**
 - Akış olmadan: 6 güne kadar
 - Akış: 5 güne kadar

Kullanıcı kontrolü

İşitme cihazı kullanıcı kontrol tuşu, işitme cihazlarınızı elle kontrol etmenizi sağlar. Bu, birçok akıllı özelliği kullanmanıza olanak sağlamak için butonu programlayabilen işitme uzmanınız tarafından ayarlanır.

Kullanıcı kontrol tuşu 3 şekilde çalışır:

- **Kısa basma:** Kullanıcı kontrol tuşuna 1 saniye basın ve ardından bırakın.
- **Uzun basma:** Kullanıcı kontrol tuşuna 3 saniye veya daha uzun süre basılı tutun.
- **Dokunma Kontrolü:** İşitme cihazınızdaki kullanıcı kontrol tuşuna veya yakınına sertçe iki kez dokunun.

Kullanıcı kontrolü	Akıllı özellik
Kısa basma (1 saniye)	
Uzun basma (3 saniye)	
Dokunma Kontrolü	

İşitme cihazlarınızı cep telefonunuzu veya diğer akıllı cihazlarınızı kullanarak da kontrol edebileceğinizi biliyor muydunuz? Daha fazla bilgi edinmek için **Uyumlu Mobil Uygulamanızı Ayarlama** kılavuzunuza bakın.

Telefon görüşmeleri ve işitme cihazları

İşitme cihazlarınız, mobil veya sabit telefonunuzdan yapılan aramaları karşılamak üzere tasarlanmıştır.

- **Sabit hatlı aramalar**

İşitme cihazı takarken sabit telefonunuzu kullanmak için işitme uzmanınızla konuşun. İşitme cihazlarınızda bir “telefon” programı ayarlamanıza yardımcı olabilir ve ipuçları sunabilirler.

- **Mobil aramalar**

Mobil telefon görüşmelerini işitme cihazlarınıza aktarmak için, dahil edilen **Uyumlu Mobil Uygulamanızı Ayarlama** kılavuzuna bakın. Bu, akıllı telefonunuzu işitme cihazlarınıza nasıl bağlayacağınızı (“eşleştireceğinizi”) gösterir. Sorularınız mı var? İşitme uzmanınız yardımcı olabilir.

İşitme Cihazı Bakımı

İşitme cihazınızı her zaman temiz tutun. Isı, nem ve yabancı maddeler düşük performansa neden olabilir.

1. Su, çözücüler, temizleme sıvıları veya yağlar kullanarak temizlemeyin. İşitme cihazınızı sökmeyin veya içine bir temizleme aracı sokmayın.
2. Kutunuzun içinde bulunan temizleme aparatını kullanarak, mikrofon, kulak kiri koruyucusu ve ses çıkışındaki kalıntıları fırçalayın veya silin.
3. İşitme cihazı sert bir yüzeye düşerse, dış kısmı veya kasanın kırılmasına ve / veya hasar görmesine neden olabilir. Bu, cihazın iç aksanında sorun yaratabilir.

Daha fazla bakım ve onarım ipucu için işitme uzmanınıza danışın.

Saklama ipuçları

İşitme cihazlarınızı takmadığınızda, bu saklama ipuçlarını kullanarak hasardan koruyun:

- **Saklama kutunuzun içinde saklayın**, böylece tekrar kullanıma hazır olurlar.
- **Serin ve kuru bir yer seçin**, ısı ve nemden uzak.Mümkünse doğrudan güneş ışığından kaçının.
- **İşitme cihazlarınızı kolayca bulabileceğinizden emin olun**, çocuklarınız ve evcil hayvanlarınız bulamasın. Bir komidin veya şifonyer idealdir.


Daha fazla saklama ipucu için işitme uzmanınıza danışın.

Filtre değiştirme


Filtre, işitme cihazlarınızda kulak kirinin birikmesini önler. İşitme cihazlarınızda biriken pislik veya zayıf ses fark ederseniz bunları değiştirmeniz en iyisidir.

Filtre değiştirmek için:


1. Uygulama çubuğunun boş ucunu işitme cihazınızın kullanılmış filtresine doğrudan yerleştirin ve sıkıca itin.

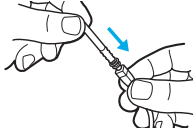


2. Uygulama çubuğu kullanılmış filtreden çıkarmak için düz çekin ve bükmeyin.

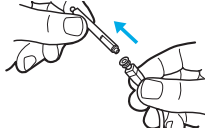

3. Uygulama çubuğunun diğer ucunu kullanarak yeni filtreyi doğrudan işitme cihazına yerleştirin ve sıkıca itin.

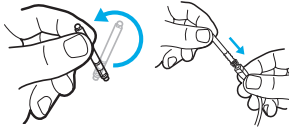

4. Uygulama çubuğunu çıkarmak için düz bir şekilde çekin. Çevirmeyin. Uygulama çubuğunu atın.

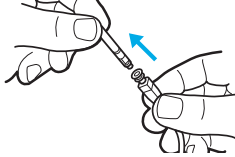

Prob değıştirme

Prob gevşek, şekilsiz veya yağ ve nemden dolayı rengi solmuşsa düzenli olarak değıştirmek iyi bir fikirdir. Ses kalitesindeki bir değışiklik de probu değıştirmek için bir sinyal olabilir.

Kulaklığınızı değıştirmek için:

1. Eski probu işitme cihazınızın hoparlöründen çekin.




2. İşitme cihazınızın kablosunu hoparlör ile birleştiği yerden tutun.




3. Hoparlörün ucunu probun ortasına yerleştirin.



4. Probun hoparlöre güvenli bir şekilde takıldığında emin olmak için sıkıca bastırın.

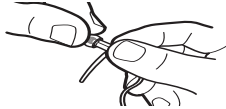

5. Probu hoparlörün dişli kısmını tamamen kapladığından emin olun. Tamamdır!

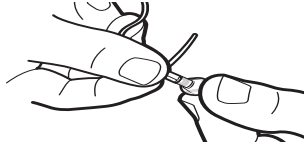

Sorun Giderme Kılavuzu

Herhangi bir nedenle işitme cihazınız düzgün çalışmıyorsa, kendiniz düzeltmeye ÇALIŞMAYIN. Yalnızca geçerli garantileri veya sigortaları ihlal etmenizin yanı sıra aynı zamanda daha fazla hasara da neden olabilirsiniz.

İşitme cihazınız arızalanırsa veya kötü performans gösterirse, olası çözümler için bu sorun giderme kılavuzunu inceleyin. Sorunlar devam ederse, tavsiye ve yardım için işitme uzmanınıza başvurun. Birçok yaygın sorun, işitme uzmanınızın ofisinde veya kliniğinde çözülebilir.

Belirti	Olası Nedenler	Çözümler
İşitme cihazları yeterince yüksek ses vermiyor.	Mikrofon tıkanıp veya filtreden ses çıkışı engellendi.	1. İşitme cihazlarınızı temizleyin. 2. Gerektiğinde filtreyi değiştirin.
	Kır birikmesi	Mikrofonu, filtreyi ve ses çıkışı temizleme fırçasıyla temizleyin.
	Pili değiştirin.	Pili değiştirin.
	Düşük pil.	Pili değiştirin.
Tutarlı olmayan işitme cihazı performansı.	Mikrofon tıkanıp veya filtreden ses çıkışı engellendi.	1. İşitme cihazlarınızı temizleyin. 2. Gerektiğinde filtreyi değiştirin.
	Düşük pil.	Pili değiştirin.

Belirti	Olası Nedenler	Çözümler
Net olmayan ve bozuk işitme cihazı performansı.	Mikrofon tıkanıp veya filtreden ses çıkışı engellendi.	1. İşitme cihazlarınızı temizleyin. 2. Gerekğinde filtreyi değiştirin.
	Düşük pil.	Pili değiştirin.
	Arızalı işitme cihazları.	İşitme uzmanınıza başvurun.
İşitme cihazlarınızdan ses gelmiyor.	Mikrofon tıkanıp veya filtreden ses çıkışı engellendi.	1. İşitme cihazlarınızı temizleyin. 2. Gerekğinde filtreyi değiştirin.
	Düşük pil.	Pili değiştirin.
	Büzülmüş hortum	İşitme uzmanınıza başvurun.
	Hoparlör kablosu işitme cihazınıza tam olarak bağlanmamış olabilir.	Hoparlör kablosunu işitme cihazınızdan çıkarın ve tekrar takın.

Kullanım Amacı

KULLANIM AMACI:

Hava yolu ıřıtme cihazı, ıřıtme kaybını telafi etmek için tasarlanmıř teknolojik bir cihazdır. ıřıtme cihazları, hafif ila çok ileri dereceye kadar ıřıtme kayıplarını tedavi etmeye uygun çoklu kazanç/çıķıř seviyesine sahiptir.

ıřıtme cihazları, Uluslararası Elektromanyetik Uyumluluęun en katı standartlarına uyacak řekilde tasarlanmıřtır. Bununla birlikte, elektrik hattı rahatsızlıklarından, havaalanı metal dedektörlerinden, dięer tıbbi cihazlardan gelen elektromanyetik alanlardan, radyo sinyallerinden ve elektrostatik deřarjlardan kaynaklanan parazitlerle karřılařmanız mümkündür.

Bařka tıbbi cihazlar kullanıyorsanız veya defibrilatör veya kalp pili gibi vücuda yerleřtirilebilir tıbbi cihazlar kullanıyorsanız ve ıřıtme cihazlarınızın tıbbi cihazınızla etkileřime girebileceęinden endiřeleniyorsanız, rahatsızlık riski hakkında bilgi için lütfen doktorunuza veya tıbbi cihazınızın üreticisine bařvurun.

ıřıtme cihazlarınızın bir MRI prosedürü sırasında veya hiperbarik bir odada veya oksijen aķısından zengin dięer ortamlarda giyilmemelidir.

ıřıtme cihazlarınız, IEC 60601-1 tıbbi cihaz standardı kapsamında B Tipi uygulamalı parça olarak sınıflandırılır.

ıřıtme cihazlarınızın, kömür madenleri veya bazı kimya fabrikaları gibi patlayıcı ortamlarda çalışmak üzere resmi olarak onaylanmamıřtır.

ıřıtme cihazlarınızın -10°C (14°F) ile +45°C (113°F) arasındaki sıcaklık, nem ve basınç aralıklarında, %10-%95 rH ve 70 kPa – 106 kPa (deniz seviyesinden 1.200 ft (380 m) ile 10.000 ft (3.000 m) arasındaki yüksekliklere eřdeęer) arasında saklanmalı ve tařınmalıdır.

ıřıtme cihazlarınızın, -20°C (-4°F) ile 50°C (122°F) arasındaki sizin için konforlu sıcaklık aralığının ötesinde çalışacak řekilde tasarlanmıřtır.

⚠ DİKKAT:

- Ürün sıcaksa soęuyuncaya kadar dokunmayın.
- Ürün çalışmıyorsa parçalarına ayırmayın. Elektrik çarpması tehlikesi nedeniyle lütfen onarma gönderin.
- Çocuklardan uzak tutun. Paketin içindeki kurutucu, temizleme aleti vb. dahil hiçbir řeyi yutmayın.

Klinik fayda

ıřıtme cihazı, yařam kalitesini artırmak amacıyla iletiřimi kolaylařtırmaya yardımcı olmak ve konuřmanın daha iyi anlařılmasını saęlamak üzere tasarlanmıřtır.

Klinik çalışma özeti

Klinik Çalışma Özeti Hafiften ileri dereceye kadar ıřıtme kaybı olan 18 yař ve üzeri yetiřkinleri kapsayan, ıřıtme cihazı performansını ve faydasını deęerlendirilen bir klinik çalışmadır. Kullanıcılar, 2-6 haftalık cihaz kullanım süresi boyunca, cihazların klinik beklentileri karřılayıp karřılamadığını belirlemek için çeřitli laboratuvar ve saha deęerlendirmelerini tamamladı. Çalışmanın sonuçları, cihazların kullanıcıların ıřıtme kayıplarına uygun amplifikasyon saęladığını ve kullanıcıların normatif verilerle tutarlı amplifikasyondan fayda algıladıklarını doęrulamaktadır. Çalışma sırasında ciddi veya kalıcı herhangi bir olumsuz olayla karřılařılmadı.

Uçaklarda kullanım

İşitme Cihazlarınızda bulunabilecek kablosuz özellikler uçakta kullanılabilir çünkü İşitme Cihazları, uçaktaki diğer kişisel elektronik cihazlara uygulanan kurallardan muafır.

İŞİTME CİHAZINI AÇMAYIN, İÇİNDE SERVİS EDİLEBİLECEK PARÇA KULLANICI TARAFINDAN YOK EDİLEBİLİR.

İşitme Bakım Uzmanları için Gerekli Multiflex Tinnitus Bilgileri

KULLANIM ENDİKASYONLARI

Multiflex Tinnitus Teknolojisi, tinnitus şikayeti olan hastaları rahatlatmak için Tinnitus Yönetim Programında kullanılacak sesleri üreten bir araçtır. Hedef kitle öncelikle 18 yaş üstü yetişkin nüfustur.

Multiflex Tinnitus Teknolojisi, geleneksel işitme kayıplarının yanı sıra tinnitus sorunu yaşayan hastaları da tedavi eden sağlık profesyonellerini hedeflemektedir. Multiflex Tinnitus Teknolojisinin ayarlanması, Tinnitus Yönetim Programına katılan bir işitme uzmanı tarafından yapılmalıdır.

ÖZELLİK AÇIKLAMASI

Multiflex Tinnitus Teknolojisi, işitme cihazına programlanan sesi üreten yazılımsal bir işlevidir. İşitme cihazı üç çalışma modundan birinde kullanılabilir: işitme cihazı olarak, tinnitus terapi cihazı olarak veya işitme cihazı ve tinnitus terapi cihazı olarak.

Etkinleştirildiğinde, Multiflex Tinnitus Teknolojisi sesi üretir ve hastanın işitme uzmanının bireysel olarak belirlenen ses terapi planı için uygun ayarları tasarlamasına ve programlamasına olanak tanır. Terapi planı, tinnitusu gidermek için tinnitus yönetim programında kullanılmalıdır.

Multiflex Tinnitus Teknolojisi, frekansı ve genişliği değişen geniş bantlı bir beyaz gürültü sinyali üretir. Bu özellikler, işitme uzmanı tarafından ayarlanabilir ve uzmanın hastanın ihtiyaçları ve konforu için tasarladığı reçeteli tedaviye özgüdür.

Hasta, sinyalin seviyesi üzerinde bir miktar kontrole sahip olabilir ve hasta, bu ayarlamayı, sinyalin konfor seviyesini ve sesini işitme uzmanına danışmalıdır.

⚠ DİKKAT: Cihaz Maksimum ses basıncı seviyesine ayarlanıp aşağıdaki önerileri aşan süreler boyunca takılırsa, hastanın ses enerjisine maruziyeti, gürültü maruziyet sınırlarını aşma potansiyeline sahiptir. Bu işitme cihazı, maksimum ses basıncı seviyesine ayarlandığında günde en fazla on altı (16) saat kullanım için tasarlanmıştır.

Hasta için

Tinnitus terapi cihazı, tinnitus terapisi için yeterli yoğunlukta ve bant genişliğinde gürültü üretmeyi amaçlayan elektronik bir cihazdır. Ayrıca dış sesleri ve konuşmaları duymaya yardımcı olarak da kullanılabilir.

Multiflex Tinnitus Teknolojisi ses üretmek için kullanılan bir özelliktir. Bu cihazın uygun danışmanlıkla ve/veya tinnitus yakınıması çeken hastaları rahatlatmak için bir tinnitus yönetim programında kullanılması önerilir.

TİNNİTUS TERAPİSİ KAVRAMLARI VE FAYDALARI

Multiflex Tinnitus Teknolojisi, tinnitus terapi programının bir parçası olarak kullanılabilir.

Multiflex Tinnitus Teknolojisi işitme cihazı aracılığıyla beyaz gürültü sunar.

Multiflex Tinnitus Teknolojisi, işitme kaybınıza ve tercihlerinize göre programlanmıştır. İşitme uzmanınız, Multiflex Tinnitus Teknolojisinin ayarlarını ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde ayarlayabilir.

Multiflex Tinnitus Teknolojisi tinnitusunuzun geçici olarak rahatlatmasını sağlayabilir.

REÇETELİ KULLANIM



DİKKAT: Yasa işitme cihazı kullanımı için lisanslı bir doktor izniyle satılmasını sınırlamaktadır.

Ses üreten herhangi bir tinnitus terapi cihazının kullanımı yalnızca işitme uzmanınızın tavsiyesi üzerine ve ona danışılarak yapılmalıdır. İşitme uzmanınız, işitme cihazını kişisel ihtiyaçlarınıza ve gereksinimlerinize uygun şekilde ayarlayacaktır. Reçete edilen tinnitus terapi programında kullanımını içermelidir.

Ayrıca işitme uzmanınız uygun takip ve bakımını da sunabilecektir. Bu tür bakımlarla ilgili işitme uzmanınızın tavsiyelerine ve talimatlarına uymanız önemlidir.



DİKKAT: Cihaz maksimum ses basıncı seviyesine ayarlanıp aşağıdaki önerileri aşan süreler boyunca kullanılırsa, hastanın yüksek sese maruz kalması gürültüyü maruz kalma sınırlarını aşma potansiyeline sahiptir. İşitme cihazı, maksimum ses basıncı seviyesine ayarlandığında günde en fazla on altı (16) saat kullanım için tasarlanmıştır.

Potansiyel Cihaz Kullanıcıları için Önemli Uyarı

İyi sağlık uygulamaları, tinnitusu olan bir kişinin, cihaz kullanmadan önce lisanslı bir hekim (tercihen KBB) tarafından tıbbi değerlendirilmeden geçmesini gerektirir. Kulak hastalıklarında uzmanlaşmış lisanslı doktorlara genellikle KBB uzmanı denir.

Tıbbi değerlendirmenin amacı, cihazı kullanılmadan önce tinnitusu etkileyebilecek tıbbi olarak tedavi edilebilir tüm durumların tanımlanmasını ve tedavi edilmesini sağlamaktır.

Kullanım Hataları Uyarısı

Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılması (kınlama, ezilme, düşmeye bağlı arızalar, kimyasal madde, ısı, sıvı, nem ve paslandırıcı veya oksitlendirici koşullara maruz kalma, yetkili servis dışında onarımlar, vb.) kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

Cihaz ile kullanılan pil, batarya, prob, kulak kalıbı, vs. gibi kullanım ömürlü malzemeler garanti kapsamı dışındadır.

TİNNİTUS TEKNİK VERİLERİ

Multiflex Tinnitus Teknolojisi Maksimum Çıkış = 87 dB SPL (tipik) ANSI S3.22 veya IEC 60118-7'ye göre 2cc kuplörde ölçüldüğünde.

KABLOSUZ TEKNİK AÇIKLAMA

İşitme cihazlarınız, GFSK iletim modülasyonu kullanılarak -1 dBm'lik maksimum etkili yayılan güçle 2.4-2.4835 GHz frekans bandında çalışan Bluetooth® Düşük Enerji kablosuz teknolojisini kullanan bir radyo alıcı-vericisi içerir. Radyonun alıcı bölümü 1.5 MHz bant genişliğine sahiptir. RIC 312 ayrıca 10 metrelik bir ölçüm mesafesinde 8-DPS K iletim modülasyonu ile -5 dBuA/m maksimum indüklenen manyetik alan gücüyle 10.281 MHz'de çalışan Yakın Alan Manyetik İndüksiyon kullanan bir radyo alıcı-vericisi içerir. NFMI radyosunun RIC 312 alıcı bölümü 400 kHz bant genişliğine sahiptir.

Bu işitme cihazı modeli aşağıdaki emisyon ve bağışıklık testlerine tabi tutulmuş ve geçmiştir:

- CISPR 11'de belirtildiği gibi Grup 1 Sınıf B cihazı için IEC 60601-1-2 radyasyon emisyon gereksinimleri.
- 80 MHz ile 2.7 GHz arasında 10 V/m alan seviyesinde RF radyasyon bağışıklığı ve IEC 60601-1-2'nin Tablo 9'unda belirtildiği gibi iletişim cihazlarından daha yüksek alan seviyeleri.
- 30 A/m alan seviyesinde güç frekanslı manyetik alanlara ve 60601-1-2'nin 11. tablosunda tanımlanan yakınlık manyetik alanlarına karşı bağışıklık.
- +/- 8 kV iletim deşarjı ve +/- 15 kV hava deşarjı ESD seviyelerine karşı bağışıklık.

Beklenen hizmet ömrü 3 yıldır.

KABLOSUZ BİLDİRİMLER

RIC 312:

FCC Kimliği: EOA-24GENR312

IC: 6903A-24GENR312

AB OLUMSUZ OLAY BİLDİRİMİ

Audibel cihazınızla ilgili olarak meydana gelen herhangi bir ciddi olay, yerel Audibel temsilcinize ve yerleşik olduğunuz Üye Devletin Yetkili Otoritesine bildirilmelidir. Ciddi olay, kullanıcının ölümüne veya sağlık durumunda ciddi bozulmaya yol açabilecek veya tekrarlama halinde bunu yapabilecek cihaz herhangi bir arıza, cihazın özelliklerinde ve/veya performansında bozulma veya cihaz kullanım kılavuzunda/etiketlenmesinde yetersizlik olarak tanımlanır.

FCC Bilgileri

Bu cihazlar FCC kuralları ve ISED Kanada lisans muafiyeti RSS standartlarına uygundur. Çalışma aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) cihaz zararlı olabilecek engellemelere sebep olmaz, ve (2) bu cihaz, cihazın istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek parazitlenme de dahil olmak üzere alınan herhangi bir girişimi kabul etmemelidir.

NOT: Üretici bu cihaza yetkisiz modifikasyonlar tarafından sebep olunan herhangi bir radyo veya tv parazitlenmesinden sorumlu değildir. Bu tür modifikasyonlar kullanıcının cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

Starkey Laboratories, Inc., RIC 312'nin 2014/53/EU Yönergesinin temel gerekliliklerine ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanının bir kopyası aşağıdaki adresten veya docs.starkeyhearingtechnologies.com adresinden alınabilir.

Starkey Laboratories, Inc., RIC 312'nin değiştirilmiş haliyle Birleşik Krallık Radyo Ekipmanı Yönetmelikleri SI 2017 ile uyumlu olduğunu beyan eder. Birleşik Krallık Uygunluk Beyanının bir kopyası aşağıdaki adreslerden ve docs.starkeyhearingtechnologies.com adresinden edinilebilir.

Mevzuat Bilgileri

Servis veya onarım için lütfen önce işitme uzmanınıza başvurun. Gerekirse işitme cihazlarınızı şu adrese gönderebilirsiniz:



Starkey Laboratories, Inc.
6700 Washington Ave. South
Eden Prairie, MN 55344 USA
www.starkey.com



Starkey Laboratories (Almanya) GmbH
Weg beim Jäger 218-222
22335 Hamburg
Germany

İngiltere Yetkili Kişisi:
William F. Austin House
Pepper Rd, Hazel Grove
Stockport SK7 5BX, İngiltere
www.starkey.co.uk



MDR 760129 R000



Elektronik ekipman atıkları yerel düzenlemelere uygun şekilde işlenmelidir.



Kullanım kılavuzuna bakın.



Kuru tutun.

Sembol	Sembol Anlamı	Uygulanabilir Standart	Sembol Numarası
	Üretici	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.1
	Avrupa Topluluğu'ndaki yetkili temsilci	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.2
	Üretim Tarihi	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.3
	Katalog Numarası	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.6
	Seri Numarası	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.7
	Tıbbi Cihaz	BS EN ISO 15223-1:2021	5.7.7
	Kuru Tutun	BS EN ISO 15223-1:2021	5.3.4
	Scacılık Sınırı	BS EN ISO 15223-1:2021	5.3.7
	Nem Sınırı	BS EN ISO 15223-1:2021	5.3.8
	Dikkat	BS EN ISO 15223-1:2021	5.4.4
	Genel Uyarı İşareti	EC 60601-1, Reference no. Table D.2, Safety sign 2	ISO 7010-W001
	Kullanım kılavuzuna/kitapçığına bakın	EC 60601-1, Reference no. Table D.2, Safety sign 10	ISO 7010-M002
	Ayrı Toplayın	DIRECTIVE 2012/19/EU (WEEE)	Annex IX
	Sınıf II Ekipmanı	IEC 60417 Reference no. Table D.1	Symbol 9 (IEC 60417-5172)
	Mevzuata Uygunluk İşareti (RCM)	AS/NZS 4417.1:2012	N/A
	Giteki İşareti	Japanese Radio Law	N/A
	Doğru Akım	IEC 60601-1 Reference no. Table D.1	IEC 60417-5031
	Geri Dönüşüm Sembolü	European Parliament and Council Directive 94/62/EC	Annex I-VII

Notes

Notes

Türkiye Distribütörü



Duyumed İşitme Cihazları A.Ş.

Fulya Mah. Büyükdere Cad. No: 74 Torun Center A Blok Ofis: 176

Şişli İstanbul

0 850 474 21 21

info@duyumed.com | www.duyumed.com



Basım Tarihi: 31.10.2023

Made for Apple rozetinin kullanımı, bir aksesuarın rozette belirtilen Apple ürünlerine özel olarak bağlanmak üzere tasarlandığı ve geliştirici tarafından Apple performans standartlarını karşıladığı onaylandığı anlamına gelir. Apple, bu cihazın çalışmasından veya güvenlik ve düzenleyici standartlara uygunluğundan sorumlu değildir. Apple, Apple logosu, iPhone, iPad ve iPod touch, Apple Inc.'in ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır. iOS, Cisco'nun ABD ve diğer ülkelerde ticari markası veya tescilli ticari markasıdır ve lisans altında kullanılır.

Google Play, Google LLC'nin ticari markasıdır.

Bluetooth® kelime işareti ve logoları, Bluetooth SIG, Inc.'in sahibi olduğu tescilli ticari markalarıdır ve bu tür markaların Starkey tarafından herhangi bir şekilde kullanımı lisans altındadır.

Multiflex Tinnitus ve Audibel, Starkey Laboratories, Inc.'in ticari markalarıdır.

©2023 Starkey Laboratories, Inc. Tüm Hakları Saklıdır. P00002032 6/23 BKL3197-00-EN-TR

Patent: www.starkey.com/patents