

Şarj Edilebilir Teknoloji Hasta Broşürü

Bakım ve Onarım



Şarj edilebilir ürünlerinizden en iyi şekilde yararlanmak için, şunlar önerilir:

- İşitme uzmanınızla her kontrolünüze işitme cihazlarınızla birlikte şarj cihazınızı getirin. Şarj cihazınız işitme cihazı sisteminin ayrılmaz bir parçasıdır. Randevunuzda, işitme uzmanınız şunları kontrol edebilir:
 - Şarj cihazınızın ve şarj edilebilir işitme cihazlarınızın genel işlevselliği
 - Fark edilebilir kir ve nem dahil olmak üzere genel aşınma ve yıpranma
 - Şarj portlarında / direklerinde düzensizlikler
- Şarj cihazınızı şifonyer veya komodin gibi temiz ve kuru bir yerde saklayın. Banyo veya mutfak gibi nemli veya rutubetli ortamlardan kaçının.
- Şarj cihazınızı aşırı ısıya maruz bırakmayın, yani pencere kenarında veya sıcak bir arabada saklamayın.
 - Elektronik kurutma sistemi kullanmayı seçerseniz, lütfen işitme uzmanınıza danışın ve sıcaklığın 40°C'yi geçmediğinden emin olun.
- Şarj cihazınızı ve şarj edilebilir işitme cihazlarınızı düzenli olarak kir açısından inceleyin; cihazlarınızı kuru, yumuşak bir bez kullanarak nazikçe silin.
 - Şarj cihazınızı veya şarj edilebilir işitme cihazlarınızı temizlemek için su, çözücüler veya temizleme sıvıları kullanmayın.
- Sadece şarj cihazınızla birlikte gelen USB-C şarj kablosunu kullanın.
- Şarj edilebilir işitme cihazlarınızı tamamen şarj olduktan sonra ve takmadığınız her zaman şarj cihazınızda saklamanız güvenlidir.
 - Ancak, işitme cihazlarınızı uzun bir süre (yani üç günden uzun) takmayacaksanız, lütfen şarj cihazınızdaki fişi ve şarj edilebilir işitme cihazlarınızı şarj cihazı portlarından çıkarın. Bunları şarj cihazınızın içindeki açık alanda saklayabilirsiniz.



Sıkça Sorulan Sorular

Lityum-iyon Şarj Edilebilir Piller



Lityum iyon pil nedir?

- Lityum iyon (Li-Ion) pil, tüketici elektroniğinde kullanılan en popüler şarj edilebilir pil teknolojisidir. Pil hücresi içindeki lityum iyonları negatif bir elektroddan pozitif bir elektroda hareket ettirerek enerji üretir. Hafif, düşük bakım gerektiren ve kısa bir şarj döngüsünden sonra uzun süreli kullanım sağlayan yüksek bir pil kapasitesine sahip olduğu için tüketici ürünlerinde yüksek kullanım oranına ulaşmıştır. Cep telefonları, kulaklıklar ve tabletler gibi birçok elektroniğe halihazırda kullanılmaktadır.

Bir işitme cihazı sistemi için neden şarj edilebilir bir lityum iyon pil seçilmiştir?

- Lityum iyon, aksesuarlardan veya akıllı telefonda ses akışı yaparken bile tam bir günlük kullanım sağladığı için bir işitme cihazı sistemi için ideal bir pildir. Pilde hafıza etkisi olmadığından günlük olarak şarj edilebilir ve şarj cihazına geri koymadan önce pili tamamen boşaltmaya gerek yoktur.

Lityum iyon şarj edilebilir bir işitme cihazıyla uçakta seyahat etmek güvenli midir?

- Evet, bu lityum iyon şarj edilebilir işitme cihazlarını uçakta takmak ve şarj cihazını uçağa getirmek güvenlidir. İşitme cihazlarını ve/veya şarj cihazını bagajınızda teslim etmek de güvenlidir. Güvenlik ve kalite testlerinden geçmişlerdir ve boyutları izin verilen maksimum değerin altındadır.
- Lityum iyon pillerin kontrol edilen bagajlarda bulundurulmasının sınırlamaları "takılmamış" lityum iyon pillerle ilgilidir. Hem şarj cihazı hem de işitme cihazlarında "takılmış" lityum iyon piller bulunduğundan, kısıtlama geçerli değildir.
- Lityum iyon pili kontrol etmek için bir watt saat sınırlaması (100 watt saat) vardır. Şarj edilebilir sistem bu sınırlamalar dahilindedir ve bu da onları uçağa almak veya teslim etmek için güvenli hale getirir.

Lityum iyon şarj edilebilir işitme cihazlarımı gönderebilir miyim?

- Nakliye düzenlemeleri değişebilir, bu nedenle en iyi eylem, tam gönderiniz için geçerli olan gereklilikler hakkında kargo şirketine danışmak olacaktır.

Ya pilim tüm gün dayanmazsa?

- Kullanımınıza göre sahip olduğunuz işitme cihazları için uygun pil beklentilerinin ne olduğunu işitme uzmanınıza danışın.

Her gece şarj etmezsem lityum iyon şarj edilebilir pilim daha uzun süre dayanır mı?

- NiCad pillerin aksine, lityum iyon pillerin şarj hafızası yoktur. Bu, derin deşarj döngülerinin gerekmediği anlamına gelir. Bu nedenle, en iyi uygulama işitme cihazlarınızı her gece şarj etmektir.

Lityum iyon şarj edilebilir işitme cihazımı nasıl elden çıkarabilirim?

- Audibel, işitme cihazlarınızın ve şarj cihazınızın yerel elektronik geri dönüşüm/bertaraf süreciyle elden çıkarılmasını teşvik eder ve yasalarımız bunu gerektirmektedir.

Referans: www.batteryuniversity.com



www.isitmecihazlari.com