

İşitme Cihazımı Test Et (Self Check)


İşitme Cihazımı Test Et (Self Check), mikrofonlar, hoparlör ve çip dahil olmak üzere işitme cihazı bileşenlerinin optimum performansını garantilemek için işitme cihazı sisteminin tanısal bir testini gerçekleştirir. Self Check, işitme uzmanı tarafından Intrigue modeller için Pro Fit, Arc modeller için Inspire veya My Audibel'de kullanılabilir.

İnspire'da Self Check'i Başlatma

Yeşil onay işaretleriyle gösterildiği gibi, işitme cihazları için otomatik olarak bir temel çizgi oluşturulacaktır. [Şekil 1]

İşitme bakımı uzmanları, hastalarının işitme cihazları için Self Check tanılmasını Pro Fit'te tamamlayabilirler.

- 1 Açılır Menü'den Fitting bölümünden Patient Tools'u seçin.
- 2 İşitme cihazlarını alıcıları yukarı bakacak şekilde düz bir yüzeye yerleştirin.
- 3 Tüm gürültü kaynaklarını azaltın.
- 4 Başlamak için Teste Başla'ya tıklayın.
- 5 Her işitme cihazında kısa ve güçlü bir uyarın çalınacaktır.

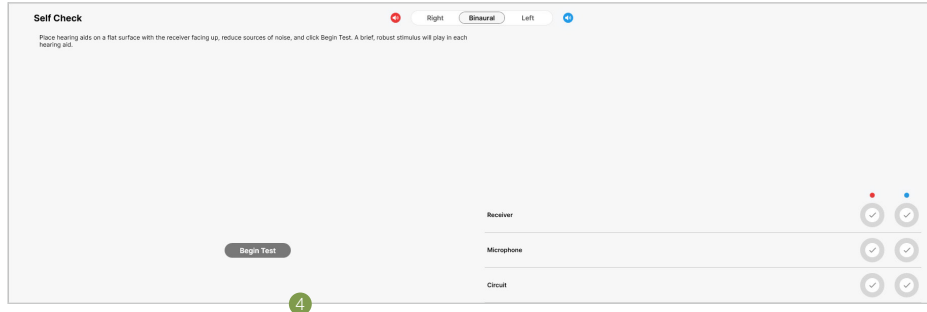


Şekil 1

İşitme Cihazımı Test Et (Self Check) Sonuçlar

Test tamamlandıktan sonra, her işitme cihazı bileşeni için sonuçlar ekranda görüntülenir. Daha fazla bilgi için sonuçların üzerine gelin. [Şekil 2]

- (A) Yeşil: Geçti
- (B) Sarı: Temel değere göre performans göstermiyor. Bileşeni kontrol edin.
- (C) Kırmızı: Kaldı

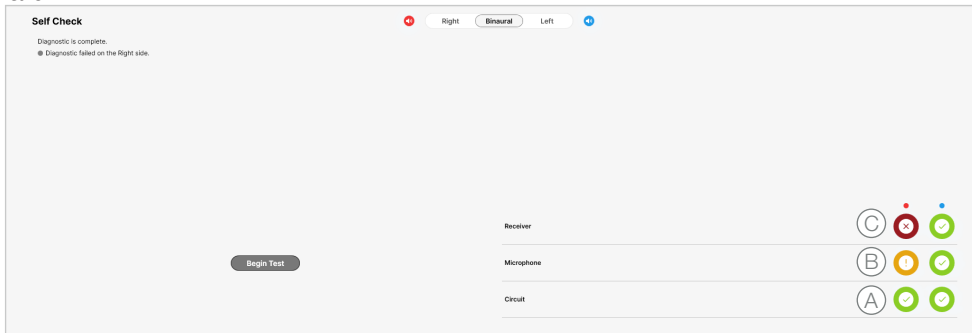

Şekil 2

Self Check

Otomatik Kontrol, hastaların işitme cihazı sistemlerinin performansını doğrudan Intrigue için My Audibel, Arc için Thrive uygulaması analiz etmeleri için hızlı ve kolay bir yol sağlar.

My Audibel'de Otomatik Kontrol'ü başlatmak için:

- 1 My Hearing'e dokununuz.
 - 2 Self Check'e dokununuz.
 - 3 İşitme cihazlarınızı alıcıları yukarı bakacak şekilde düz bir yüzeye yerleştirin.
 - 4 Tüm gürültü kaynaklarını azaltın.
 - 5 Self Check'i çalıştırı seçin.
 - 6 Her işitme cihazında kısa bir ses duyulacaktır.
 - 7 Test tamamlandığında, her işitme cihazı bileşeninin sonuçları ekranda görüntülenir.
 - 8 Her bileşenin altında Ayrıntılar'a dokununuz.
- Aşağıda bileşen ekran örnekleri gösterilmektedir

Thrive'da Otomatik Kontrol'ü başlatmak için:

- 1 Daha Fazlası'na dokununuz ≡.
- 2 Otomatik Kontrol'e dokununuz.
- 3 İşitme cihazlarınızı alıcıları yukarı bakacak şekilde düz bir yüzeye yerleştirin.
- 4 Tüm gürültü kaynaklarını azaltın.
- 5 Teşhis işlemini çalıştırı seçin.
- 6 Her işitme cihazında kısa bir ses duyulacaktır.
- 7 Test tamamlandığında, her işitme cihazı bileşeninin sonuçları ekranda görüntülenir.

