


My Audibel

Android Versiyon

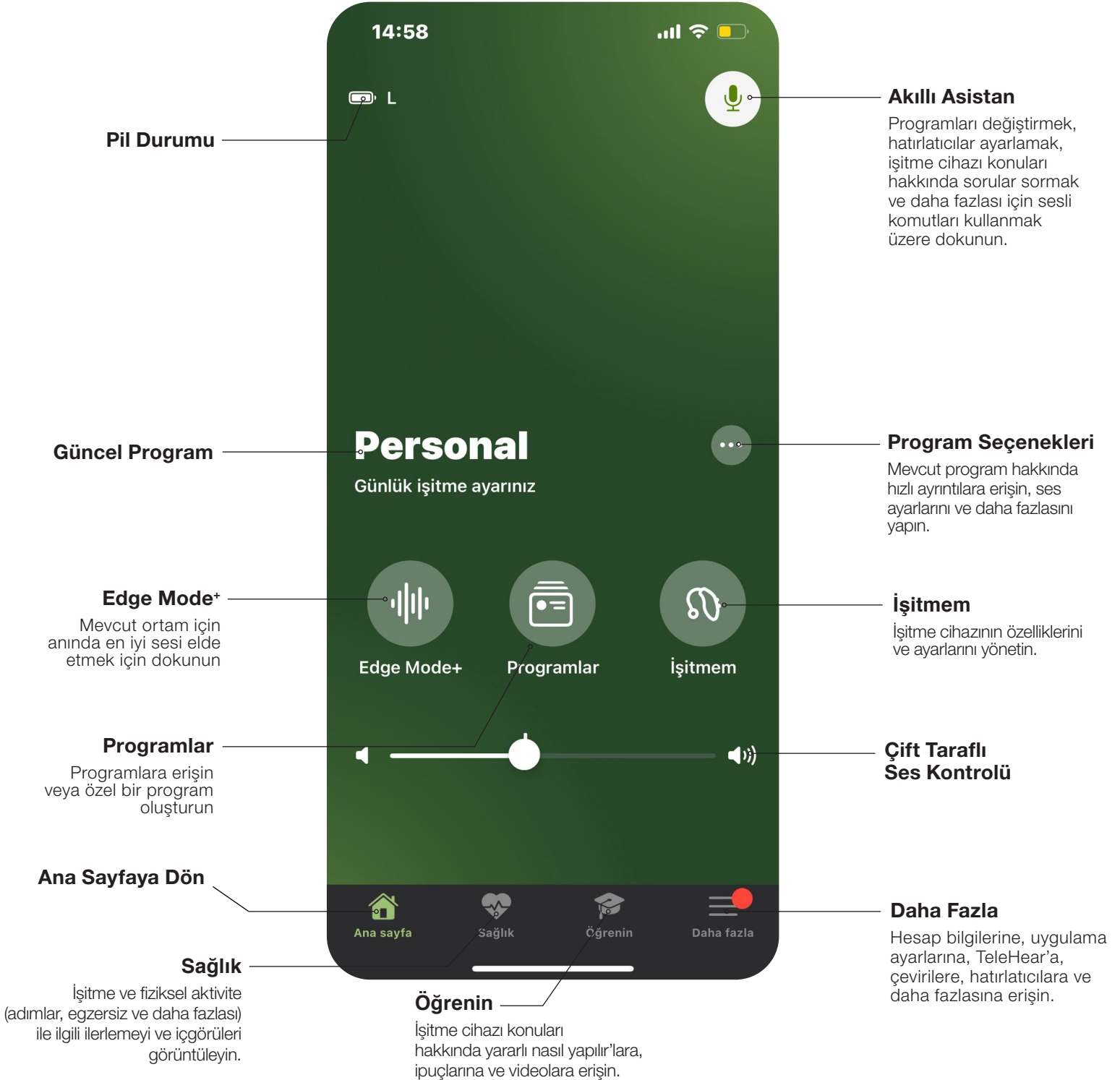

My Audibel'i İndirme

My Audibel'i indirmek için bir Google Play Store hesabınız olması gerekir. Bir Google Play Store hesabı **Ayarlar>Hesaplar**'a giderek oluşturulabilir. Mevcut bir hesap seçin veya yeni bir hesap oluşturmak için **Hesap Ekle**'yi seçin.

- 1 Bir hesap oluşturulduktan sonra Play Store'u açın.
- 2 **My Audibel**'i arayın.
- 3 **Yükle**'yi seçin.



MyAUDIBEL

My Audibel İlk Kurulum ve Eşleştirme

My Audibel işitme cihazlarını arayacak ve eşleştirecektir. Eşleştirme, işitme cihazları Pro Fit yazılımında programlandıktan sonra tamamlanmalıdır. Herhangi bir Android cihazla eşleştirmeden önce Pro Fit'in kapalı olduğundan emin olun.

- 1 Uygulama kurulum sürecini başlatmak için **Başlayın**'a dokununuz.
- 2 Kullanım Şartlarını inceleyin. Devam etmek için **Kabul Et**'e dokununuz.
- 3 İşitme cihazlarının şarj edildiğinden ve açık olduğundan emin olun. **Devam**'ı seçin.
- 4 Bir istem, kullanıcıya Yakındaki Cihazlar İzni gerektiğini bildirir. **Tamam**'a dokununuz, ardından **İzin Ver**'i seçin.
- 5 İstendiğinde **Eşleştir**'i seçin, ardından **İzin Ver**'e dokununuz.
- 6 My Audibel işitme cihazlarına bağlanacaktır. **Devam**'ı seçin.
- 7 Bir e-posta adresi ve parola ile oturum açın veya bir hesap oluşturun. **Bir hesap gereklidir.** Bulut Bağlantısı TeleHear, Düşme Uyarısı ve uygulama/işitme cihazı bilgilerinin yedeklenmesine ve geri yüklenmesine olanak tanır.
- 8 My Audibel'in kullanıcının konumuna erişmesine ve bildirimleri paylaşmasına izin vermek için **Devam**'ı seçin.
- 9 Kullanıcılardan My Audibel'in kullanıcıya bildirimler göndermesine izin vermeleri istenir. **İzin Ver** veya **İzin Verme**'yi seçin.
- 10 Kullanıcılardan My Audibel'in İşitme cihazı verilerini, Aktivite takibini ve Analizleri toplamasına ve depolamasına izin vermeleri istenir. **İzin Ver** veya **Şimdi Değil**'i seçin.

Tamamdır. **Anladım**'ı seçerek My Audibel'e girin.